

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-05-30

Diskning av instrument och sterilgodshantering

Revideringar i denna version

240530 Omarbetad och titelbyte från tidigare Sterilgodshantering.

Syfte

Att säkerställa så att instrumenten och sterila instrument diskas och hanteras på ett korrekt sätt.

Arbetsbeskrivning

Bakgrund

Hantering av sterilgoods är centraliserad och inga instrument steriliseras längre ute på sjukhusets avdelningar. Eftersom instrument som vi använder finns i cirkulation och skickas i försändelser är det viktigt att sortera och hantera dem rätt. Förlorade instrument orsakar stora kostnader och engångsinstrument som skickas till sterilisering orsakar onödigt arbete. Alla instrument är flergångs och SKA diskas i Diskdesinfektor, OBS ej i Spoldesinfektor.

Alla instrument

- Diskas i diskdesinfektor i diskrummet.
- Öppna alltid ledade instrument (ex sax, peang), minst 90 graders vinkel.
- Kan hängas eller läggas i diskgaller
- Överlasta ej diskgallret!
- Övrig information, v.g. se vårdhandboken [Diskdesinfektor - Vårdhandboken \(vardhandboken.se\)](#)
- Bruksanvisning (företagets) finns vid respektive Diskdesinfektor.

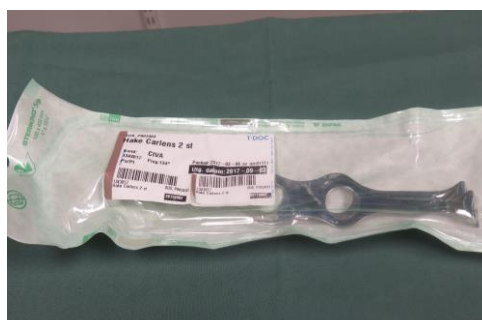


Bild ovan: Exempel på sterilgodis som steriliseras på sterilcentralen.
Förpackningarna är etikettsmärkta från sterilcentralen.

Sterila instrument

Instrument som ska till sterilcentralen sorteras bort och skickas av dag-USK.
Instrumenten från sterilcentralen förvaras sedan i sterilförrådet på anvisad plats.

Granskare/arbetsgrupp

Miriam Hallin, Dagusk CIVA, AnOpIva Område 5, SU

Ulrika Donelius, Dagusk NIVA, AnOpIva Område 5, SU Frida Mattsson,
Tekniksjusköterska, CIVA, AnOpIva Område 5, SU Lotta Börjesson, Instruktör
CIVA, Område 5, SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1509

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-05-30