

Gäller för: Avdelning 51 NÄL

Giltig från: 2026-01-09

Innehållsansvar: Josefine Lingvall, (josli1), Sjuksköterska

Giltig till: 2028-01-09

Granskad av: Johannes Johansson, (johjo59), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

# Respirator till IVA

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

### Bakgrund och syfte

Patienter som har fått en trakeostomi på IVA och behöver en respirator. På kontorstid vänder sig IVA till Ventilatormottagningen, men då mottagningen är stängd kontaktas avdelning 51. Denna rutin gäller för sjuksköterskor på avdelning 51.

### Åtgärder

Så här ska du göra:

- OBS! Sida 2 av detta dokument gäller **hemventilator/respirator Astral 150**.
- Hämta en **hemventilator/respirator Astral 150** på lungmottagningen, lägg meddelande till ventilatorsjuksköterska med **patientens namn, personnummer och individnummer på respirator** (7-siffrigt nummer på blå/vit etikett).
- Programmera (ställa in) **hemventilator/respirator**.
- Packa **hemventilator/respirator**.
- Lämna **hemventilator/respirator** till IVA.

## Snabbguide för att ställa in hemventilator/respirator Astral 150:

- Hämta en hemventilator/respirator Astral 150 på lungmottagningen.
1. Koppla in strömkabeln till vägguttag och sedan på Astralens baksida.
  2. Tryck på den gröna AV/PÅ-knappen på baksidan, maskinen startar efter några sekunder.
  3. Tryck på hänglåset i det övre vänstra hörnet i några sekunder, välj sedan obegränsad tid. Maskinen är nu i kliniskt mode och man kan göra inställningar.
  4. Om man inte trycker på skärmen på några minuter så låser sig skärmen och när du trycker på den svarta skärmen får man en fråga om du vill låsa upp skärmen, tryck Lås upp.
    - Se till att det sitter en kretsadapter för dubbelslang på maskinen. (Båda adaptrarna ska se likadana ut.)
    - Ta fram en dubbelslang och ett grönt filter. Filtret ska sitta på ut luften (vänster sida).
  5. När man har låst upp maskinen så kommer flera menyer upp, välj då **inställ.-assistent**.
    - Tryck start. -> Fortsätt.
  6. Vuxen.
  7. Dubbel krets.
    - Starta.
    - Följ vad som står. Ha ingen slang kopplad, -> tryck fortsätt. Sätt fast det gröna filtret och även dubbelslangen, -> tryck fortsätt. Håll nu för slangens ände och tryck fortsätt. När tre gröna bockar och ett gult streck på syrgassensor, visas är kretsinlärningen godkänd.
  8. Tryck bekräfta.
    - Välj invasiv om pat har track, -> tryck fortsätt.
    - Välj tryckfunktion **PS**.
  9. Larm behöver inte ställas in, låt det vara.
  10. Tryck på hänglåset i det övre vänstra hörnet och på frågan "lämna klinisk funktion? Tryck bekräfta och maskinen är låst."
    - Tryck på den gröna Av/På knappen på baksidan en gång och vänta i någon sekund. Du får då frågan om att "Stänga av respiratorn", välj Bekräfta. Maskinen stänger av sig.
    - Ta ur strömkabeln ur väggen och maskinen och lägg den i väskan. Packa sedan ner maskinen i väskan. Packa även ner slangen och filtret i slangpåsen och ta med.
    - Nu är hemventilator/respirator Astral 150 klar för att skickas till IVA.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Avdelning 51 NÄL

**Innehållsansvar:** Josefine Lingvall, (josli1), Sjuksköterska

**Granskad av:** Johannes Johansson, (johjo59), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10065-1615652915-46

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2026-01-09

**Giltig till:** 2028-01-09