

Gäller för: Avdelning 51 NÄL

Innehållsansvar: Josefine Lingvall, (josli1), Sjuksköterska

Granskad av: Johannes Johansson, (johjo59), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-07

Giltig till: 2028-01-07

# Hemventilator till IVA

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

## Bakgrund och syfte

Rutin för när IVA kontaktar avdelningen på jourtid och meddelar att de har en patient som är trakeostomerad med trakealkanyl och kommer att behöva prova ut en hemventilator.

## Utförande

### Gör följande:

- Ta ut en Astral 150 från buffertförrådet och var noga med att skriva av individnumret som sitter någonstans på apparaten (ett blåvitt klistermärke med VGR-loggan samt texten ”Västra Götalandsregionen Tillhör hjälpmedelscentralen) på en lapp med patientdata och lämna på ett av tangentborden på Ventilatormottagningen.
- Börja alltid med installationsassistenten!
- Använd alltid dubbelslang (Limbo, artikel 36022).
- Följ uppmaningarna i installationsassistenten. Oxygensensor kommer inte få en grön bock eftersom det krävs att en arbetsorder läggs i WebSesam för medicintekniker på Hjälpmedelscentralen i Skövde ska kunna montera denna. Eftersom oxygensensorn är känslig och sällan används skickas Astralen normalt inte ut med denna. Rekommendationen är i stället att använda pox samt ta blodgas.
- Sätt maskinfilter (grönt, artikel 36048) till vänster.
- Program som används är PS (Pressure support) eller P(A)CV (Assisterad tryckstyrd funktion). Välj ett av dessa program (IVA ändrar vid behov) och stäng av Astralen.
- Koppla in syrgasnippeln om patienten ska ha syrgas.
- Gå ner till IVA med Astralen, tillbehören (inkopplade) samt väska med allt innehåll.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Avdelning 51 NÄL

**Innehållsansvar:** Josefine Lingvall, (josli1), Sjuksköterska

**Granskad av:** Johannes Johansson, (johjo59), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10065-1615652915-47

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-01-07

**Giltig till:** 2028-01-07