

Gäller för: Lungmottagning NÄL, Avdelning 51 NÄL
Innehållsansvar: Josefine Lingvall, (josli1), Sjuksköterska
Granskad av: Johannes Johansson, (johjo59), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-05

Giltig till: 2028-06-05

LUMIS på jourtid - Ventilatormottagningen NÄL

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

I händelse att patient med ventilator av typ Lumis skrivs in i slutenvården akut på jourtid och inte har med sig sin apparat (och inte heller har någon som kan hämta den) alternativt då apparaten går sönder på jourtid (det vill säga när ventilatormottagningen är stängd).

Denna rutin gäller för patienter som har fått en ventilator av typen Lumis 100 eller 150 utprovad via Ventilatormottagningen.

Åtgärder

Så här ska du göra:

1. Ta upp ”Patientbakgrunden” i Melior, där finns inställningar och vilken BiPAP patienten ska ha (Lumis 100 eller Lumis 150).
2. Hämta rätt BiPAP på Lungmottagningen (på Ventilatormottagningen, första rummet på höger sida efter entrédörren), lägg meddelande till Ventilatorsjuksköterska med:
3. Patientens namn
4. Personnummer
5. Individnummer på BiPAP:en (7-siffrigt nummer på blå/vit etikett på BiPAP:en).
6. Programmera BiPAP:en enligt ordination i ”Patientbakgrund”, sätt BiPAP:en i hemmaläge/låst läge innan den skickas/lämnas ut.

7. Dokumentera i Melior vad som hänt och vilka åtgärder du vidtagit.
8. Ska en ineliggande patient ha BiPAP:en sätt en lapp på BiPAP:en där det står att den är en låneutrustning som ska lämnas tillbaka till Ventilatormottagningen då patienten åker hem från sjukhuset.
9. Ska BiPAP:en hem till en patient vars BiPAP är trasig, behöver det stå vad den packas i, det vill säga i väska. Packa BiPAP:en, beställ transport (om ingen kan hämta på avdelningen) tel 020-91 90 90, välj ”Godstransport”.
Ansvar (=kostnadsställe) 11251.

Snabbguide för att ställa in en Lumis 100/150

OBS! Har patienten befuktare så står det att patienten har en TRI-pack alt. att patienten har befuktning, välj då en Lumis med befuktare, välj annars en utan befuktare (viktigt då dessa har olika artikelnummer).

- Sätt i kontakten och vänta tills BiPAP:en startar upp.
- Tryck på knappen med huset och den runda knappen samtidigt tills du kommer in i klinisk miljö.
- Välj inställningar och bekräfta genom att trycka på den runda knappen.
- Börja med att byta språk till svenska om BiPAP:en är inställd på engelska samt kontrollera/ställ in rätt datum och
- tid genom att skrolla (vrid på den runda knappen) tills du kommer till dessa alternativ nästan längst ned.
- Skrolla därefter upp igen och knappa in de parametrar som står i ”Patientbakgrunden”.
- Sätt BiPAP:en i hemmaläge/låst läge genom att välja ”Avsluta klinisk meny”.

Mycket viktigt att larmet ”Oventilerad mask” alltid är på!

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Lungmottagning NÄL, Avdelning 51 NÄL

Innehållsansvar: Josefine Lingvall, (josli1), Sjuksköterska

Granskad av: Johannes Johansson, (johjo59), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10065-776977986-28

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-05

Giltig till: 2028-06-05