

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-09-07

Giltig till: 2028-09-03

Ingångsvatten Munkedal

mikrobiologisk och kemisk kontroll

Q Di 263

1 ex i avdelningspärm

Provtagnings-anvisningar

Provtagningskit från SGS. Se provtagningsinstruktion ”Analys av dricksvatten, allmän anläggning” på SGS hemsida.

Pga transporttid tas mikrobiologi så nära upphämtningstid som möjligt.

Transport bokas hos SGS Kundsupport dagen innan tel. 013-254990

vårt kund nummer är 259332

Upphämtning sker mellan kl 13-16. Vattenproverna förvars i kylskåp och packas i medföljande kylväska från SGS en stund innan hämtning. Frysklampar skall läggas i nätfickorna i väskan. 6 i den mellanstora väskan så proverna behåller kylan.

Provtagningsansvarig:	Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef
Frekvens:	2 gånger/år
Provtagningsställe:	Tappställe märkt ingångsvatten i vattenrum kran RÅ vtn
Provtagningskärl:	Provtagningskit Från SGS
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	SGS Sweden AB
Provsvär:	Skickas via e-post till dialysmott och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på SharePoint ytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen”.

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Vid förekomst av höga halter av något eller några ämnen skall jämförelse göras med kemiska analysresultat på vatten taget efter vattenreningsanläggningens RO-membran. Uppvisar även dessa analyser för höga ämneshalter, kontrolleras reningsanläggningens verkningsgrad. VEC/kvalitetsansvarig, sakkunnig person och medicinskt ansvarig för tillverkning ska alltid kontaktas vid avvikande provsvar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-315831522-240

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-07

Giltig till: 2028-09-03