

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-28

Giltig till: 2027-04-28

Q Di 509 Hanteringsföreskrifter för andningsoxygen i portabel flaska

-
- 1 ex i avdelningspärm
 - 2. Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering.

Se förvaring och kontroll av medicinska gasflaskor enl Im mall 18

En gång i veckan ska gastrycket kontrolleras.

Detta signeras på checklista Q Di 510

Vid full flaska skall regulatorn visa 200 bar (20 000 kPa)

Om gastrycket visar 50 bar ska gasflaskan bytas.

För byte av gasflaska: Ring 010-4413500

När flaskan är utbytt skrivs detta på checklistan Q-Di 510, trycket avläses och signeras.

Personlig ansvarsbeskrivning finns enl mall.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-157

Version: 11.0

Giltig från: 2025-04-28

Giltig till: 2027-04-28