

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-17

Giltig till: 2028-03-17

Instruktion för provtagning HD- vätska i hemmet av HemHdpatient med Fresenius utrustning Q Di 611

En kopia i avdelningspärm, Kopia i demonstrationspärm samt i patient pärm hemma

Dialysatprovtagning

- 1. Sätt på dialysmaskinen och tryck på **Behandling****
- 2. Koppla koncentrat: Smartbag och Bibag.**
- 3. När T1 – Test ok visas på skärmen låt maskinen stå 10 minuter för att uppnå stabil konduktivitet.**
- 4. Ta fram tre provtagningsrör: 2 plaströr med gul kork och 1 provtagningsrör 50ml.**
- 5. Sprita händerna och sätt på munskydd.**
- 6. Öppna shuntluckan. Ta blå koppling och sätt fast i filterhållaren. Ta röd koppling och håll över ett kärl.**
- 7. Stäng shuntluckan och låt dialysatvätskan rinna fritt ner i kärlet.**
- 8. Fyll provtagningsrören. OBS! håll i nedre kant på rören så du ej kontaminerar öppningen. Låt dialysatvätskan falla fritt ner i rören/ ha ett ”gap” emellan). Ha ett reservrör till hands ifall du råkar vidröra rörsöppningen eller kork, ta då ett nytt rör.**

Ta röret för Na K Cl först eftersom det kan ändras.

9. Öppna shuntluckan och sätt tillbaka kopplingarna.

10. Lägg rören i kylvätska (glöm ej kylklampar) och lämna till Dialysmottagningen.

11. Töm Bibag via dialysatmenyn och sätt dialysmaskinen på het desinfektion ifall du inte ska dialysera direkt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-171

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-17

Giltig till: 2028-03-17