

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-05-18

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-05-14

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Kontroll/skötsel av dialysmaskin 5008, 6008 GMP Q Di 101

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Bruksanvisning

Pärm med bruksanvisning för resp. dialysmaskin finns i anslutning till behandlingsrummen.

Kontrollera programvaruversion i dialysmaskinen.

- Välj *Status / Maskininfo* och notera *Mjukvara*

Välj bruksanvisning med motsvarande programvaruversion.

Desinfektion

OBS! Max 72 timmar får gå mellan desinfektionsprogram innan behandling.

Om > 72 timmar \Rightarrow het desinfektion innan behandlingsstart.

Daglig skötsel

Efter avslutad dialysbehandling avtorkas maskinen med yt-desinfektion plus.

Etanol 70% på de delar som har kontakt med dialysat, (Bic-anslutning, vattenkopplingarna till filtret). Bic-anslutningen med vatten först för att lösa bic-rester.

Månadsstäd

Minst en gång i månaden storstädas maskinen. Signeras på Q Di 103.

- Rengör Dialysat kopplingar med RO vatten
- Torka samtliga slangar på baksidan maskinen
- Observera luftfilter, damma vid behov, ta ej loss, detta görs av tekniker i samband med service.
- Sprit avtorka hela maskinens ytor fram och baksida.
- CDS kopplingarna lossas från panelen och rengöres med RO vatten en gång per vecka. Lossa och rengör en i taget. (gäller NÄL)
- Kontrollera maskinens klocka och korrigera vid behov.
- Avsluta med hetdesinfektion.

Samtliga moment nedan signeras på checklista Q Di 103.

Integrerad värme:

- Signera i avsedd ruta att integrerad värme genomförts, 3 ggr /vecka.
- Tid för senaste rengöringsprogram noteras.

Signatur i ruta A:

- Maskinen har genomgått desinfektionsprogram inom 72 timmar.
- Godkänd T1 test/ uppstarts test.
- Maskinen är primad och klar att använda för dialysbehandling.

Konduktivitet:

- Avläses i förberedelsefasen, värdet skrivs i avsedd ruta.

Signatur i ruta ”Het desinfektion”

- Desinfektionsprogram körts.
- Maskinen är yt-torkad med desinfektionsmedel.

Byte av Diasafefilter Fresenius

- Diasafefilter bytes efter 12 veckor eller efter 100 behandlingar.
- Dialysmaskinen indikerar själv när filtren skall bytas (Om den gått T1 test).

För filterbyte se bruksanvisning

- Efter filterbyte märks de nya filtren med aktuellt datum.
- Filterbytet signeras på checklistan Q Di 103.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-28

Version: 23.0

Giltig från: 2026-05-18

Giltig till: 2028-05-14