

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-10-21

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-10-10

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

# Kontroll/skötsel av dialysmaskin 5008, 6008 GMP Q Di 101

---

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

**OBS!** Max 72 timmar får gå mellan desinfektionsprogram innan behandling.

Om > 72 timmar ⇔ het desinfektion innan behandlingsstart

Efter avslutad dialysbehandling avtorkas maskinen med yt-desinfektion plus.

Etanol 70% på de delar som har kontakt med dialysat, (Bic anslutning, vattenkopplingarna till filtret).

Bic anslutningen med vatten först för att lösa bic rester.

Minst en gång i månaden storstädas maskinen. Signeras på Q Di 103.

- Rengör Dialysat kopplingar med RO vatten
- Torka samtliga slangar på baksidan maskinen
- Observera luftfilter, damma vid behov, ta ej loss, detta görs av tekniker i samband med service.
- Sprit avtorka hela maskinens ytor fram och baksida.
- CDS kopplingarna lossas från panelen och rengöres med RO vatten en gång per vecka. Lossa och rengör en i taget. (gäller NÄL)
- Kontrollera maskinens klocka och korrigera vid behov.

**Samtliga moment nedan signeras på checklista Q Di 103.**

**Integrerad värme:**

- Signera i avsedd ruta att integrerad värme genomförts, 3 ggr /vecka.
- Tid för senaste rengöringsprogram noteras.

**Signatur i ruta A:**

- Maskinen har genomgått desinfektionsprogram inom 72 timmar.
- Godkänd T1 test/ uppstarts test.
- Maskinen är primad och klar att använda för dialysbehandling.

**Konduktivitet:**

- Avläses i förberedelsefasen, värdet skrivs i avsedd ruta.

**Signatur i ruta ”Het desinfektion”**

- Desinfektionsprogram körts.
- Maskinen är yt-torkad med desinfektionsmedel.

**Byte av Diasafefilter Fresenius**

- Diasafefilter bytes efter 12 veckor eller efter 100 behandlingar.
- Dialysmaskinen indikerar själv när filtren skall bytas (Om den gått T1 test).

**För filterbyte se bruksanvisning 6008 Programvaruversion 2.46**

- Efter filterbyte märks de nya filtren med aktuellt datum.
- Filterbytet signeras på checklistan Q Di 103.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

**Innehållsansvar:** Eva-Lis Henriksson, (evahe47),  
Vårdenhetschef

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-28

**Version:** 22.0

**Giltig från:** 2025-10-21

**Giltig till:** 2027-10-10