

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-05-07

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-05-05

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Funktionsfel dialysmaskin GMP Q Di 104

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Vid funktionsfel på dialysmaskin dokumenteras detta genom tydlig beskrivning av felet på Q Di 105 med datum och signatur.

Maskinen ställs i teknikerrummet och röd skylt ”reparation pågår får ej användas för behandling” hängs på maskinen.

Desinfektera dialysmaskinens snabbkoppling med 70% sprit.

Desinfektera tappmyynningen på RO kranen (märkt utag) med 70% sprit och låt vattnet rinna fritt någon minut före ihop koppling dialysmaskinen till RO uttag.

Funktionsfel på dialysmaskiner som är av sådan grad att maskinen fortfarande kan vara i drift, dokumenteras enligt ovan, samt rapporteras till avdelningens tekniker.

När aktuellt fel blivit åtgärdat dokumenteras detta med datum och signatur av Medicintekniker, grön skylt ”ok att använda för behandling” hängs på maskinen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-30

Version: 14.0

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-05