

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-17

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Giltig till: 2027-04-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Instruktion för provtagning på Dialysmaskin Q Di 107 GMP

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin
Nytt i denna version gäller även för Munkedal

1. Uppstart och förberedelse av maskin som vid patientbehandling enligt manual.
2. Prov tas enligt lokal anvisning Q-Di 205 och Q-Di 206 via filterkopplingen från artärslangen.
5008: när priming helt klar och maskinen är i förberedelsefas
6008: Montera kassetten skruva **inga** anslutningar lås dörren, vänta tills test är klar och förberedelse visas. Gå in under dialysat meny, öka dialysat flöde till 300ml.
3. Vänta tills stabil konduktivitet 5-6 minuter.
4. Läs av konduktivitet. Öppna shuntluckan ta blå koppling sätt fast i filterhållaren, ta röd dialysat koppling och håll över ett kärl, stäng luckan och låt ca 200ml rinna ner i kärlet med gap, tag därefter proverna med sedvanlig aseptik och aseptiskt tänk. Tag provet för Na,K Cl först.
5. Montera därefter alla anslutningar och prima slangsett som vanligt.
6. Behandlingsnatrium skall vara 140mmol/L. Kalium i dialyskoncentrat 3,0. Ladda inte patientkort.
7. Datum och provtagning signeras på Q Di 109.
8. Provsvar skannas in och sparas på sharepointytan ”GMP Vatten – Dialys och njursviktsmottagningen”

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-32

Version: 17.0

Giltig från: 2025-04-17

Giltig till: 2027-04-17