

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2024-08-27

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Giltig till: 2026-08-27

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Blodläckage åtgärd GMP Q Di 111

I ex i originalpärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Om blodläckagelarm uppstår på dialysmaskinen och synligt blod syns i avgående dialysatslangen från filtret gör på detta sätt:

1. Avbryt behandlingen, **ge ej blodet tillbaka till patienten.**
2. Ska patienten fortsätta behandlingen, kan samma maskin användas. Prima upp nytt slangsett och filter enligt ordination. Dialysbehandling fullföljs och avslutas enligt respektive maskins manual.
3. Ska behandlingen avslutas körs ett desinfektionsprogram enligt respektive maskins manual. (6008 börjar desinfektionen med en spolning)
OBS 6008 efter ett blodläckage kan dialysatkopplingarna vara kontaminerade med blod. Efter behandling och före start av desinfektionsprogrammet måste därför kontaktplatserna i shuntluckan och dialysatkopplingarna rengöras med vatten och därefter desinfekteras manuellt med ytdesinfektion plus innan de sätts tillbaka. För 5008 gå in under rengöringsprogram och välj spolning (om det är valbart) 9 min därefter het desinfektion.

Maskinen kan nu användas till nästa patient.

Om blodläckagelarm uppstår på dialysmaskinen och inget synligt blod syns i avgående dialysatslangen från filtret gör på detta sätt:

4. Tag på handskar.
5. Tag dialysat från avgående dialysatslang i en plastmugg. Kontrollera med en Teststicka för blod om blod finns, eller kontrollera direkt på dialysat avloppet med stickan.
6. Om stickan blir positiv gör som under punkt 1-3
7. Om stickan är negativ:
Tryck på knappen förbikoppling/återställ larm. Återkommer larmet, avsluta dialysbehandlingen som vanligt kör ett desinfektionsprogram efter respektive maskins manual

Maskinen kan nu användas till nästa patient.

Falsa blodläckagelarm kan uppstå om det finns luft kvar i filtret samt om filtret vänds under pågående dialys.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-35

Version: 18.0

Giltig från: 2024-08-27

Giltig till: 2026-08-27