

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-17

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-04-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

# Dialysmaskin som varit ur drift >5 dagar

## GMP Q Di 132

---

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

1. Koppla maskinen till vatten och eluttag och starta desinfektionsprogram.
2. Så fort maskinen är klar se serviceprotokoll skall det tas prover för mikrobiologi och endotoxiner. (kör ett värmeprogram först)
3. Maskinen märks med skylt väntar på provsvar.
4. Till dess att godkända provsvar finns körs desinfektionsprogram dagligen.
5. Maskinen får ej användas för dialys förrän provsvaren är inom godkända gränser.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

**Innehållsansvar:** Eva-Lis Henriksson, (evahe47),  
Vårdenhetschef

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-37

**Version:** 15.0

**Giltig från:** 2025-04-17

**Giltig till:** 2027-04-17