

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-17

Innehållsansvar: Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2027-04-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Skyltrutin för dialysmaskin i verkstad

GMP Q Di 141

1 ex i avdelningspärm

Innehåll:

1. Allmänt
2. Skyltar som endast används i verkstan
3. Flera skyltar på samma maskin
4. Skyltar som används på hela avdelningen

1. Allmänt

Skyltarnas avsikt är att identifiera respektive maskins driftstatus.

Samtliga maskiner i verkstan ska vara försedda med relevant skyltning enligt beskrivning i detta dokument.

Skyltar som inte används på maskin ska förvaras på därav avsedd plats i verkstan.

Alla maskiner i verkstan utom de som har tillägsskylten ”Maskinen får ej startas”, ska köras på rengöringsprogram enligt gällande rutin.

2. Skyltar som endast används i verkstan



OK att använda (grön med vit text):

Denna skylt ska hänga i droppställning på maskin som kan användas i klinisk drift, men som står i verkstan.



Ur funktion (*gul med svart text*):

Denna skylt ska hänga i droppställning på maskin som p.g.a. tekniskt fel inte kan användas i klinisk drift.

Till tekniskt fel räknas även underkänt **kemiskt** provsvar.



Service pågår (*blå med vit text*):

Denna skylt ska hänga i droppställning på maskin som undergår förebyggande underhåll (service) och därför inte kan användas i kliniskt bruk.



Avvaktar provsvar (*svart med vit text*):

Denna skylt ska hänga i droppställning på maskin, som på grund av underkänt **mikrobiologiskt** provsvar inte kan användas i klinisk drift eller på maskin som varit ur drift >5 dagar.

Maskinen får ej startas (*röd med vit text*):

Detta är en *tillägsskylt* och ska endast hänga framför skylten ”Ur funktion” eller ”Service pågår” (se fig.1).



Denna skylt ska hänga på maskin då läckage föreligger, och/eller när maskinen av någon annan anledning inte går att köra på rengöringsprogram.

Skylden kan även hängas upp av andra orsaker.

Denna tillägsskylt innebär att maskinen endast får startas av tekniker.

fig.1



3. Flera skyltar i droppställning på samma maskin

Om flera skyltar hängs på samma maskin ska de hänga på varsin krok i droppställningen, undantaget är tillägsskylten ”Maskinen får ej startas” som ska hänga framför skylten ”Ur funktion” eller ”Service pågår” på samma krok (se fig.1).

4. Skyltar som används på hela avdelningen



Patientbunden maskin (*grön med vit text*):

Denna skylt ska hänga i droppställning på maskin som på grund av smittorisk endast används för behandling av enskild patient.



Endast HD (*blå med vit text*):

Denna skylt ska hänga i filterhållare på maskin vars mikrobiologiska- eller endotoxin-provsvär är godkänt för HD-behandling men inte för online-behandling. Eller maskin som är dedikerad för enbart HD-behandling.



Ta vattenprov (*vit med svart text*):

Denna skylt ska hänga i filterhållare på maskin som (enligt schema) är aktuell för provtagning med avseende på mikrobiologi, endotoxiner och/eller kemi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-45

Version: 7.0

Giltig från: 2025-04-17

Giltig till: 2027-04-17