

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-09-21

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-09-16

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Hd vätska mikrobiologi kontroll, endotoxin bestämning provtagnings anvisning Q Di 203

1 ex i avdpärm

Mikrobiell kontroll:

Provtagningsansvarig:	Vårdenhetschef. Noterar i loggbok under flik 4, på instruktion kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmaskin. Vilka prover som är tagna.
Frekvens: NÄL	4 gånger/år
Frekvens: Munkedal	4 gånger/år se bilaga 1
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid dialysator
Provtagningskärl:	Sterila plaströr 50 ml.
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	Mikrobiologen SU- Sahlgrenska
Provsvär:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan "GMP vatten-Dialys och njursviktsmottagning"

Endotoxin bestämning:

Provtagningsansvarig:	Provtagande sjuksköterska
Frekvens NÄL	2 gånger/år samt vid underkänt bakteriologiskt prov.
Frekvens Munkedal	4 gånger/år
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid dialysator.
Provtagningskärl:	Sterilt glaströr (gul kork) 6 ml.
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	Mikrobiologen SU- Sahlgrenska
Provsvär:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan "GMP vatten-Dialys och njursviktsmottagning."

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Dialysmaskinerna desinfekteras. Ny provtagning utförs enligt instruktion.

Dialysmaskinen tas ur bruk. Uppställning i verkstad, med skylt "inväntar provsvär".

Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.

Bilaga 1 till Q Di 203 dokument-ID: NU 10066-406871065-54

Provtagningschema För Dialysmaskin i Munkedal:

Januari April Juli Oktober

Tjorven
Obelix
Tjatte

Februari Maj Augusti November

Klang
Asterix
Knatte

Mars Juni September December

Båtsman
Kling
Stina
Pippi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-54

Version: 9.0

Giltig från: 2026-09-21

Giltig till: 2028-09-16