

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-07
Giltig till: 2027-05-02

Hemodialysvätska kemisk kontroll

provtagnings anvisning Q Di 204

1 ex i avdelningspärm

Kemisk kontroll.

Provtagningsansvarig:	Vårdenhetschef
Frekvens: NÄL	4 gånger/år
Frekvens Munkedal	6 gånger/år
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinerna, tillförande Dialysatslang vid filter
Provtagningskärl:	Provrör, gult 6 ml
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	Laboriemedicin, NÄL
Provsvär:	Skickas till dialysmott och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan "GMP-vatten-Dialys och njursviktsmottagningen"

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Ta om provet. Begär akutsvar från Lab. anteckna i loggbok 4 omprov samt datum. Vid fortsatt avvikande provsvar tas dialysmaskinen ur drift. Uppställning i verkstad med skylt "inväntar provsvar" Anteckna i loggboken. Åtgärdas av medicintekniker.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-55

Version: 8.0

Giltig från: 2025-05-07

Giltig till: 2027-05-02