

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-07

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-04-04

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Hemofiltrationsvätska kemisk kontroll

provtagnings anvisning GMP

Q Di205

1 ex i avdelningspärm

Kemisk kontroll.

Provtagningsansvarig:	Vårdenhetschef
Frekvens: NÄL	En gång varannan månad Hälften av maskinerna månad 1,3,5,7,9,11 (R:1,2,11,12 verkstad) Resterande månad 2,4,6,8,10,12 (R: 3,4,6,7 och 8) finns checklista för vilken maskin
Frekvens Munkedal	En gång varannan månad hälften av maskinerna varje gång. Finns checklista för vilken maskin
Provtagningsställe: 5008	Filterkopplingen vid artärslangen
Provtagningsställe: 6008	Röd dialysat koppling
Provtagningskärl:	Provrör 6ml (Gult)
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift, för hemofiltrationsvätska.
Analys av prov:	Laboratoriemedicin, NÄL
Provsvår:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, Signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvår skannas in och lagras på sharepointytan "GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Konduktivitet.

Ansvarig för mätningen:	Tjänstgörande dialysköterska, som noterar i maskinens checklista Q Di 103
Frekvens:	Vid varje användningstillfälle
Larmgräns:	Godkänt intervall

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Ta om provet. Begär akutsvar från Lab, anteckna i loggbok omprov samt datum.

Vid fortsatt avvikande provsvar tas dialysmaskinen ur drift.

Ställ ut i verkstad med skylt invänta provsvar.

Åtgärdas av medicintekniker.

Informera Vårdenhetschef/sektionsledare, sakkunnig person, MLA samt ansvarig dialysläkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-56

Version: 7.0

Giltig från: 2025-04-07

Giltig till: 2027-04-04