

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-09-21

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-09-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Hemofiltrationsvätska mikrobiologisk kontroll, endotoxin bestämning provtagningsanvisning GMP Q Di 206

Ett ex i avdelningspärm

Denna version tagit bort provtagning av Munkedals maskiner., 5008

Mikrobiell kontroll:

Provtagningsansvarig:	Vårdenhetschef
Frekvens: NÄL	1 gång varannan månad. Hälften av maskinerna månad 1,3,5,7,9,11. (R :1,2,11,12 verkstad) Resterande månad 2,4,6,8,10,12 R: 3,4,6,7 och 8. Lista dialysmaskiner se sid 5
Provtagningsställe: 6008	Röd dialysat koppling
Provtagningskärl:	Steril plastflaska, 500 ml
Gränsvärden:	<10 cfu/100ml före slutfilter enl. gällande föreskrift.
Analys av prov	Bakt.lab, Sahlgrenska
Provsvär:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan "GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".
Endotoxin bestämning:	
Provtagningsansvarig:	Vårdenhetschef
Frekvens: NÄL	1 gång varannan månad. Intervall se ovan.
Provtagningsställe: 6008	Röd dialysat koppling
Provtagningskärl:	Sterilt glaströr (gul kork), 6 ml.
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift
Analys av prov:	Bakt. lab, Sahlgrenska
Provsvär:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan "GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Om gränsvärde 11-100 cfu/100 ml kan maskinen användas för HD behandling.

Priming och dialysavslut utförs med NaCl.

Maskinen märks med skylt endast HD.

Fyll i protokoll enl sid 4 och sätt på maskinpärmens framsida.

Kvalitetsansvarig ssk/ vårdenhetschef ansvarar för att det även framgår på driftsprotokollet att maskinen kan användas för HD behandling samt datum.

Om högre gränsvärde än ovan tas aktuell dialysmaskin ur drift.

Ny provtagning utförs enligt instruktion.

När svar finns med godkända gränsvärden tas skylt samt försättsblad bort och kvalitetsansvarig/vårdenhetschef skriver i driftprotokoll godkänd för online behandling samt datum.

Om upprepad växt vid ny kontrollodling (x 2) tas maskin ur drift och lämnas till avd tekniker för genomgång.

Om växt över gränsvärde i flera maskiner samtidigt vid varannan månads provtagning skall alla online maskiner odlas.

Dialysmaskinen skall vara ur drift tills provsvar visar
< 10 cfu/100ml.

VEC/Kvalitetsansvarig, sakkunnig person samt medicinskt ansvarig för tillverkning informeras alltid om avvikande provsvar.

DIALYSMASKIN

Är ej godkänd för HDF. CFU =

Endast HD behandling fom
tills nytt godkänt
Provsvar.

PRIMAS OCH AVSLUTAS MED NaCL/

sign.....

Dialysmaskiner

PROVTAGNING
varannan
månad

Ansvar	Namn		
NÄL	<i>Jan, Mars</i>		
1	Jane		
1	Nasse		
1	Tiger		
1	Piff		
1	Diddi		
1	Murre		
1	BULL		
1	MUSSE		
1	<i>Knytttet</i>		
1	<i>Gena</i>		
1	TARZAN		
1	<i>Bobbo</i>		
1	<i>Trisse</i>		
1	<i>Pelle</i>		
1	RU		
1	EMIL		
NÄL	Feb, Apr		
2	Drutten		
2	IOR		
2	Lady		
2	MIMMI		
2	BAMBI		
2	GULLAN		
2	STAMPE		
2	Maja		
2	Lilla My		
2	Bill		
2	Snorkf		
2	PUFF		
2	Måns		
2	PUH		
2	Mumin		
2	Findus		
2	Pettson		

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och
Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-57

Version: 11.0

Giltig från: 2026-09-21

Giltig till: 2028-09-17