

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-04-14

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Giltig till: 2028-04-08

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Mikrobiologi och Endotoxin kontroll av tillredningsvatten CWP 1 och CWP2 GMP Q Di 207

1 ex i avdelningspärm

Provtagnings anvisningar tillredningsvatten.

Tappningsmynningen desinfekteras med 70% sprit och därefter får vattnet rinna fritt någon minut före provtagning.

Prov för endotoxin och mikrobiologi skickas till mikrobiologen SU.

Arkivering av provsvar

Dialysmottagningen arkiverar alla provsvar.

Provsvaret skannas in och lagras på sharepointytan "GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen".

Kontroll mikrobiologi och endotoxin.

Provtagningsansvarig:	Kvalitetsansvarig ssk/Vårdenhetschef, Tekniker
Frekvens:	12 gånger per år (varje månad)
Provtagningsställe:	CWP 1 och 2 efter RO1 kran/uttag nr 8 Efter CWP 1 Första tappställe R13 1:1 Sal 6 sista tappställe 1:11 Efter CWP 2: Första tappställe Behrum 2:1 Rum 4 sista tappställe 2:17 Övriga tappställen prov tas 4 ggr per år se schema bilaga 2,3,4
Provtagningskärl:	Steril flaska 500 ml för mikrobiologi Rör 6 ml för endotoxiner
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift, vatten för tillredning
Analys av prov:	Mikrobiologen SU.
Kontroll av:	Totala mikroorganismer och endotoxiner.

Till detta dokument finns bilaga 1 Q Di 207 Kontrollprogram Vattenkvalité

Tillredningsvatten. Här ska provtagningen signeras.

Åtgärder vid överskridna mikrobiologiska gränsvärden:

Kontakta vårdenhetschef som informerar sakkunnig person samt medicinsk tekniker. De tar tillsammans med ledningsansvarig läkare, ansvarig dialysläkare beslut om vidare åtgärder.

Provtagningschema tappställe bilaga 2

Månad	Jan		April		Juli		Okt	
Prov	Endo	Mikro	Endo	Mikro	Endo	Mikro	Endo	Mikro
Tappställe CWP 1:								
R 13 1:2								
R 13 1:5								
Rum 8 1:8								
Verkstad 1:12								
Verkstad 1:15								
Prov	Endo Mikro		Endo Mikro		Endo Mikro		Endo Mikro	
Tappställe CWP 2:								
Rum 1 2:2								
Rum 1 2:5								
Rum 2 2:8								
Rum 3 2:11								
Rum 4 2:14								
Varje månad:								
CWP 1 efter RO kran 8								
Rum 13 1:1								
Rum 6 1:11								
CWP 2 efter RO kran 8								
Beh rum 2:1								
Rum 4 2:17								

Kem SGS x 2 per år

mars/apr aug/sept

Provtagningschema tappställe bilaga 3

Månad	Feb	Maj	Aug	Nov
Prov	Endo Mikro	Endo Mikro	Endo Mikro	Endo Mikro
Tappställe CWP 1:				
Rum 13 1:3				
Rum 12 1:6				
Rum 8 1:9				
Verkstad 1:13				
Verkstad 1:16				
Prov	Endo Mikro	Endo Mikro	Endo Mikro	Endo Mikro
Tappställe CWP 2:				
Rum 1 2:3				
Rum 2 2:6				
Rum 2 2:9				
Rum 3 2:12				
Rum 4 2:15				
Varje månad				
CWP 1 efter RO kran 8				
Rum 13 1:1				
Rum 6 1:11				
CWP 2 efter RO kran 8				
Beh rum 2:1				
Rum 4 2:17				

Kem SGS x 2 per år
mars/apr aug/sept

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-59

Version: 10.0

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-08