

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-02-06

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-02-04

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

HemHd kommunalt vatten

Hemodialysvätska mikrobiologi, endotoxin

provtagnings anvisning Q Di 209

1 ex i avdelningspärm

Mikrobiologi

Provtagningsansvarig:	Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på Checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna
Frekvens:	Mikrobiologi 4 gånger/år
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid filter
Provtagningskärl	Sterilplast flaska 500 ml. Fylls minst 100ml
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	Bakt. lab, Sahlgrenska
Provsvär:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten-Dialys och njursvikt.

Endotoxin

Provtagningsansvarig:	Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna
Frekvens:	2 gånger/år.
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid filter.
Provtagningskärl:	Provrör 6 ml (gul kork)
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov:	Bakt.lab, Sahlgrenska
Provsvär:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvär skannas in i och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten-Dialys och njursvikt.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Desinfektion på dialysmaskinerna. Ny provtagning utförs enligt instruktion

Dialysmaskinen tas ur bruk. Dialysbehandling sker på NÄL, tills proverna är godkända.

Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Dokument-ID: NU10066-406871065-61

Version: 8.0

Giltig från: 2026-02-06

Giltig till: 2028-02-04