

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare
Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Giltig från: 2026-02-06

Giltig till: 2028-02-04

HemHd egen brunn Hemodialysvätska Mikrobiellkontroll samt endotoxin bestämning provtagnings anvisning Q Di 210

1 ex i avdelningspärm

Mikrobiologi

Provtagningsansvarig:	Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna
Frekvens:	6 ggr/år.
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinen, tillförande dialysatslang vid filter.
Provtagningskärl:	Sterilplastflaska 500ml prov volym minst 100 ml.
Gränsvärden	Enligt gällande föreskrift.
Analys av prov	Bakt.lab, Sahlgrenska
Provsvår:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvår skannas in och lagras på sharepointytan "GMP" Vatten- Dialys och njursvikt.

Endotoxin bestämning

Provtagningsansvarig	Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. Noterar i loggbok under flik 4, på checklista kontrollprogram vattenkvalitet Q Di 109, för respektive dialysmonitor, vilka prover som är tagna
Frekvens:	4 gånger/år.
Provtagningsställe:	Vid dialysmaskinerna, tillförande dialysatslang vid filter
Provtagningskärl	Provrör 6 ml. (gul kork)
Gränsvärden:	Enligt gällande föreskrift
Analys av prov:	Bakt Lab, Sahlgrenska
Provsvår:	Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvår skannas in och lagras på sharepointytan "GMP" Vatten- Dialys och njursvikt..

Åtgärder vid mikrobiologisk växt:

Desinfektion av dialysmaskin. Ny provtagning utförs enligt instruktion.

Dialysmaskinen tas ur bruk. Dialysbehandling sker på NÄL tills proverna är godkända.

Vid kvarstående underkända prover utreds orsaken.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Dokument-ID: NU10066-406871065-62

Version: 7.0

Giltig från: 2026-02-06

Giltig till: 2028-02-04