

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL  
Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare  
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare  
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-07  
Giltig till: 2027-05-02

# HemHd egen brunn Hemodialysvätska kemisk kontroll provtagnings anvisning Q Di 212

1 ex i avdelningspärm

## Sammanställning

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient.   |
| Frekvens:             | 6 ggr/år.   |
| Provtagningsställe:   | Vid dialysmaskinen, tillförande dialysatslang vid filter.   |
| Provtagningskärl:     | Provrör, 6 ml (gult)  |
| Provtagningsrutin:    | OBS: Dialyskoncentratets Kaliumvärde måste anges på remissen.<br>Provtagning enl. Q Di 611  |
| Gränsvärden:          | Enligt gällande föreskrift.   |
| Analys av prov:       | Kem lab, NÄL  |
| Provsvär:             | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.<br>Provsvär skannas in och lagras på sharepointytan "GMP" Vatten- Dialys och njursvikt. |

### Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Kontakta medicinskt ansvarig för tillverkning som bedömer provsvaren.

Meddela dialystekniker och anteckna i loggboken.

Tag två nya kemiska prover. Ev Dialysbehandling på NÄL tills godkända provsvär. Teknisk justering om prover ej godkända.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-64

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-05-07

**Giltig till:** 2027-05-02