

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-04-14

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-04-08

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Instruktion för CWP1 o CWP2 Baxter GMP Q Di 234

1 ex i avdelningspärm, bilaga utskriven och finns i vattenrum

Se anslag uppsatt på CWP 1 och CWP 2 i vattenrummet.

- **Daglig drift se bilaga 1 i loggbok på hyllan**
- **Kolfilter bilaga 2**
- **Kontaktlista vid Larm på CWP 1 och 2 se bilaga 3**
- **Avhärtningsfilter bilaga 4**
- **Byte av partikelfilter bilaga 5**
- **Hårdhetstest av vatten efter avhärtningsfilter bilaga 6**
- **Klorkontroll av vatten med PRC sticka efter avhärtningsfilter bilaga 15**
- **Hårdhetsmätare bilaga 7 (utdrag ur manual)**
- **Klormätare bilaga 8 (utdrag ur manual)**
- **Klinikpanel Larmhänvisning bilaga 9 (utdrag ur manual)**
(vid larmåterställning dokumentera åtgärd på protokoll i dagligdrift pärm)
- **Inkoppling av sterilfilter på CWP bilaga 10**
- **Omkoppling till en slinga bilaga 11**
- **Tidkanaler bilaga 12**
- **Ändring av gränsvärde när en CWP försörjer båda slingorna på natten. bilaga 13**
- **Dokumentation och handhavande CWP 800 vattenanläggning WSE00018 NÄL Trollhättan. bilaga 14**

Signering av utförda moment på checklista, bilaga 1, hyllan i vattenrummet.
Ansvarig den som är först på plats av HD personalen.

Åtgärder vid utebliven hetdesinfektion av slinga mer än 48 timmar.

- Gå över till HD-drift på dialysmaskiner kopplade till den berörda slingan.
- Informera medicinskt ansvarig för tillverkning, dialys ansvarig överläkare, VEC/sektionsledare, driftansvarig för teknik samt sakkunnig person.
- Nyckelpersoner fattar beslut om fortsatt behandlingstyp och eventuella åtgärder.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-68

Version: 14.0

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-08