

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-05-07

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-05-05

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Instruktion för CWP1 o CWP2 Baxter GMP Q Di 234

1 ex i avdelningspärm, bilaga utskriven och finns i vattenrum

Se anslag uppsatt på CWP 1 och CWP 2 i vattenrummet.

- **Daglig drift se bilaga 1 i loggbok på hyllan**
- **Kolfilter bilaga 2**
- **Kontaktlista vid Larm på CWP 1 och 2 se bilaga 3**
- **Avhärtningsfilter bilaga 4**
- **Byte av partikelfilter bilaga 5**
- **Hårdhetstest av vatten efter avhärtningsfilter bilaga 6**
- **Klorkontroll av vatten med PRC sticka efter avhärtningsfilter bilaga 15**
- **Hårdhetsmätare bilaga 7 (utdrag ur manual)**
- **Klormätare bilaga 8 (utdrag ur manual)**
- **Klinikpanel Larmhänvisning bilaga 9 (utdrag ur manual)**
(vid larmåterställning dokumentera åtgärd på protokoll i dagligdrift pärm)
- **Inkoppling av sterilfilter på CWP bilaga 10**
- **Omkoppling till en slinga bilaga 11**
- **Tidkanaler bilaga 12**
- **Ändring av gränsvärde när en CWP försörjer båda slingorna på natten. bilaga 13**
- **Dokumentation och handhavande CWP 800 vattenanläggning WSE00018 NÄL Trollhättan. bilaga 14**

Signering av utförda moment på checklista, bilaga 1, hyllan i vattenrummet.
Ansvarig den som är först på plats av HD personalen.

Åtgärder vid otillräcklig hetdesinfektion av slinga.

Indikation och kontroll

- Om blå lampa på ljusindikatorn i korridoren lyser och klinikpanelen visar informationssignal 29 *Otillräcklig desinfektion av distributionsslinga*.
- Kontrollera genom att trycka på larmlistknappen (se bilaga 9 Q Di 234) om informationssignalen även har förekommit vid föregående hetdesinfektion av slingan. För att se när hetdesinfektion av slingan utförts, se *Loop disinfection* i bilaga 12 Q Di 234, för respektive CWP i vattenrummet.

Åtgärd vid enbart 1 otillräcklig hetdesinfektion av slingan.

- Normal dialysbehandling kan utföras.

Åtgärd vid 2 eller fler i följd otillräckliga hetdesinfektioner av slingan.

- Gå över till HD-drift på dialysmaskiner kopplade till den berörda slingan.
- Priming och avslut sker med koksalt (NaCl).
- Informera medicinskt ansvarig för tillverkning, dialysansvarig överläkare, VEC/sektionsledare, driftansvarig för teknik samt sakkunnig person.
- Nyckelpersoner fattar beslut om fortsatt behandlingstyp och eventuella åtgärder.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-68

Version: 15.0

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-05