

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare
Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-05

Giltig till: 2026-10-21

CDS Daglig drift GMP Q Di 247

1 ex i avdelningspärm, samt pärm CDS rum

Kontroll av koncentrat-anläggningen utförs varje morgon.

Kontroller skrivs in i statusprotokoll i CDS-rummet.

En sign för båda koncentraterna samt temperatur och läckage-detektor.

Här ska anges:

1. Färg på respektive lampor ovanför behållarna
2. Vilken behållare som är i drift, A eller B (ligger under system, manuell tankomkoppling)
3. Att inga läckage föreligger. Sign att läckagedetektor ligger på golvet.
4. Rumstemperaturen min o max.
5. Att slangarna är upphängda och inte ligger i kläm
6. Signatur.

Anläggningen är automatisk och programmerad för start kl 06 och stopp kl 22 alla dagar i veckan.

Vid avvikelser

Röd lampa:

Är tanken tom? → Byt behållare

Är tanken inte tom? → Bekräfta tank bytt, då sker ny avluftning innan anläggningen stoppar på kvällen.

Läckage:

Kontrollera anslutningar, ev. byt tank och läckande tank reklameras. Meddela tekniker, sektionsledare eller vårdenhetschef.

Rumstemperatur skall vara mellan +15 och +25. Om för hög temperatur:

Uteslut termometer fel

Kontakta Västfastigheter

När temperaturen åter är normal byt till nya tankar från Godsmottagningen om temperaturen har överstigit +30.

Om du inte lyckas få i gång cirkulationen på CDS använd dialyskoncentrat i påse, Smartbag.

Meddela Dialystekniker, VEC, sektionsledare vid fel.

Förvaras i temperatur +5° C - +30° C

Statusprotokoll konzentranläggning och Loggbok: Start/stand-by
 konzentranläggning CDS3
 Fresenius Medical Care

Bag in box 300L

Månad: År: Blad nr:

(D)= drift dvs vilken behållare som används

Koncentrat: 311,25 (CDM1)

Koncentrat: 211,25 (CDM2)

Dag	Behållare 1A	Behållare 1B	Rums Temp Min/max	Behållare 2A	Behållare 2B		Läckage Detektor På golvet	Skrivit i Fel logg? Q Di 105 J och sign
	Lampa Röd/Grön Samt ev D	Lampa Röd/Grön Samt ev D	Min/max	Lampa Röd/Grön Samt ev D	Lampa Röd/Grön Samt ev D	Sign	Sign	Sign
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-73

Version: 11.0

Giltig från: 2024-11-05

Giltig till: 2026-10-21