

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare
Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-28

Giltig till: 2028-01-28

CDS byte av koncentratbehållare GMP

Q Di 248

1 ex i avdelningspärm, 1 ex i pärm CDS rum

En koncentratbehållare innehåller 300 l koncentrat, så det föreligger inget akut behov att byta behållare omedelbart vid rött ljuslarm, det måste dock åtgärdas samma dag. Skulle båda behållarna var tomma utgår ljus och ljudlarm, följ manual. Baserad på instruktionerna från Fresenius Medical Care se bilaga 1 Q Di 248 Handhavande CDS3 i koncentratrum.

Standardkoncentrat för dialysmottagningen är AC-F 311,25 (K 3,0) och AC-F 211,25 (K 2,0)

Risk för förväxling, byte dubbelsigneras

Kontrollera koncentrat-beteckning noga!

Följ instruktionen från Fresenius Medical Care, se bilaga 1 Q Di 248 i koncentratrum.

Fyll i och signera byte av behållare i Loggboken-byte av koncentratbehållare.

När bytet av koncentratbehållare är klart skall för-avlufning utföras enligt Fresenius Medical Care instruktion. Signering av för-avlufning görs i Loggbok – byte av koncentratbehållare.

Obs! hållbarhet på en öppnad koncentratbehållare är 30 dagar. Efter det måste den bytas även om den inte är tom.

Den som bytt koncentrat antecknar på anslagstavlan utanför expeditionen/ meddelar exp/usk vilket koncentrat som önskas så vidareförmedlas det till transport som kör upp koncentratbehållare.

tel 010 4410966 / helg ringer ssk själv 010 4410962

Golvet städas 1 ggr/ v. Signeras på checklista Q Di 319. Ytan under koncentratbehållare städas i samband med byte av behållare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-74

Version: 13.0

Giltig från: 2026-01-28

Giltig till: 2028-01-28