

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör
Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-11

Giltig till: 2027-09-03

Munkedal Vattenrening systemspecifikation, skötsel och underhåll GMP Q Di 258

Ett ex i avdelningspärm

Ändringar i denna version.
Lagt till värmedesinfektion, loggdator och partikelfilterinformation.

Typ

Lauer Aquaboss

Leverantör

B.Braun

Funktion /Omfattning

Vattenreningssenheter som omfattar:

- Kolfilter
- Avhårdare
- Partikelfilter
- Klormätare
- RO-enhet
- Värmedesinfektionsenhet (Hot Rinse)
- Distribueringslinga med 11 st. Tappställe.

Värmedesinfektion av slinga: Enligt tidkanal
Desinfektion av RO enhet: Enligt tillverkarens rekommendation.

Daglig skötsel

Ansvarig för kontroll av anläggning för dagens verksamhet: Dialyssköterska/Undersköterska

Här ingår kontroll av driftparametrar, loggdator och saltmängd i avhårdare enligt dokument Q Di 259 med bilagor.

Salt för avhårdare

Typ av salt: Salttabletter
Påfyllnadsfrekvens: Vid behov
Kontrollfrekvens: Dagligen

Indikator för klormätare

Flaskor: Reagent A, Reagent B och Reagent C
Utbytesfrekvens: Var 3:e månad eller larm på klormätaren.
Provtagning klorsticka 1 gång per vecka

Partikelfilter

Filter: 2st Cartridge 20" x 5 µm
Utbytesfrekvens: Var 3:e månad.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-82

Version: 5.0

Giltig från: 2025-09-11

Giltig till: 2027-09-03