

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

## Rutin

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-05

### Q Di 259 bilaga 1 Checklista vattenanläggning Aqua Boss

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Bilaga 1 till Q Di 259 Dokument-ID NU10066-406871065-83

År	Månad	Vattenmätare antal m <sup>3</sup> : (Avläses varje vecka, på måndagen)
----	-------	---

Beskrivning av testerna finns i rutinen **Daglig kontroll av vattenreningssystemet se Q Di 259 bilaga 2 i vattenpärm**

Dag	Tid för kontroll	Kontroll av larm RO och Hotrinse display	Spolning av grovfilter Max: 5s (sign)	Hårdhet <10% avvik mellan ref och rie j på display OK / ej ok	Grovfilter Diff (in-ut) ≤ 2 bar		Kontroll tidsinställning Avhärda re OK / ej OK	Kontroll tidsinställning Kolfilter (2 st) OK / ej OK	Konduktivitet <15 µS/cm µS/cm	Kontroll av larm på klormätare från måndag – fredag < 0,1mg/l Manuell kontroll varje måndag		Salt nivå Mellan max och min nivå OK / ej OK	Förfilter: se på RO-display om behov av byte. Krävs byte? Ja / Nej	Sign	Byte förfilter		Salt på-fyllning Antal säckar + datum	Sign	Anm	
					In bar	Ut bar				1 (datum)	2 (datum)									
Mån																				
Tis																				
Ons																				
Tors																				
Fre																				
Mån																				
Tis																				
Ons																				
Tors																				
Fre																				

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Jan Mattsson, (janma32), Medicinteknisk ingenjör

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-84

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-05-07

**Giltig till:** 2028-05-05