

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-03-17

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-03-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Störning vattenförsörjning/CWP eller CDS GMP Q Di 32

1 ex i avdelningspärm, 1 ex i vattenrum

Vid problem med vattenförsörjningen till CWP eller vid avbrott på CDS SKALL alltid Medicinsk ledningsansvarigläkare, ansvarig dialysläkare, Vårdenhetschef/sektionsledare, Sakkunnig person och Medicinsk tekniker informeras.

Vattenlarm på CWP 1 och CWP 2 uppkommer då det inte finns tillräckligt med vatten. Problemet kan finnas utanför sjukhuset (t ex ledning som gått sönder) eller inom sjukhuset. Vid bristande vattenförsörjning uppkommer larm på CWP, ”Låg ink nivå”. Om larmet försvinner inom ett par minuter kan dialysbehandlingarna fortsätta.

I de fall larmet blir kvar, ring Västfastigheter, 010 – 441 35 00 vardagar 07:00-16:00. Övrig tid 010-4350000 (växeln), för att få besked om vad felet beror på samt hur långt driftstopp man beräknar. Kontakta i andra hand Trollhättans energi AB, 0520 – 49 74 00 (denna telefon är öppen dygnet runt).

Om vattenbristen beräknas bli långvarig, beslutar HD-ansvarig läkare samt sakkunnig person tillsammans med vårdenhetschef om vidare åtgärder. TIB (tjänsteman i beredskap), verksamhetschef samt chefläkare informeras. Om vattenbristen berör hela sjukhuset kommer stabs-/förstärknings- eller katastrofläge utlösas, för att se vad som gäller vid de olika beredskapslägena, se NU-sjukvårdens katastrofplan. Patienter som kan vänta med dialys till nästkommande dag kopplas ur dialys och får komma tillbaka nästa dag. OBS vätskebalans och P-Kalium.

Om dialysbehandling inte kan utföras på NÄL nästkommande dag:

1. Munkedal fyller upp befintliga fm platser och startar även ett em skift.
2. Patienter får sin behandling på VGRs övriga dialysavdelningar, personal från NÄL följer med och tar hand om egna patienter. Tider för behandlingar efter överenskommelse med mottagande avdelning.
3. Patienttransporter ombokas via Västtrafik 020 – 91 90 90.
4. Välj i första hand kliniker med Freseniusmaskiner.
5. Ta med dialystillbehör, så att det räcker till två behandlingar, akutbeställning görs vid behov med leverans till mottagande enheter.
6. CWP 1 och CWP2 ska startas i cirkulation för att förhindra bakterieväxt, OBS maskinerna blir inte desinficerade i detta läge.

7. Om desinfektion av dialysmaskiner inte kan utföras, se rutin Q Di 101 samt Q Di 132.

Vid chockklorering av vattnet:

Vid hög bakterieväxt i vattnet kan Trollhättans Energi chockklorera vattnet. Innan detta sker ringer de och meddelar att så kommer att ske.

In vatten och beredningsvattnet (efter kolfiltren) ska då testas för klor, se rutin Q Di 239 innan dialys återupptas/startas.

För patienter i dialys bypasa dialysatet i väntan på resultat av klorprovet (enl Q Di 239) genom att öppna shuntluckan på maskinen. Om positivt klor följ noga anvisningen enl Q Di 239.

OBS om patienter dialyseras på annan mottagning/avdelning skall dialys avslutas omedelbart När Trollhättan energi ringer om klorering.

Problem med CWP:

Koppla över till den andra CWP:n se instruktioner i vattenrummet.

Om båda CWP slutar att fungera, **Informera MLA, dialysansvarig överläkare, sakkunnig person medicinsk tekniker samt VEC/sektionsledare som tar beslut om sterilfilterkörning.** Koppla över till sterilfilter se anvisning i vattenrummet samt Q Di 452.

Vid vattenläcka:

Ring västfastighet.

Vid problem med CDS:

Använd ”smartbag”.

Meddela vårdenhetschef och/eller sektionsledare samt sakkunnig person, medicinsk tekniker (nästkommade dag om problemet uppstår på jourtid).

Kontaktuppgifter Dialysmottagningar VGR

Enhet	Telefonnr	Typ av maskin
SkAs/Skövde	0500 - 43 19 75, 0500 - 43 24 55	Fresenius 6008
Diaverum/Falköping	0515 - 870 90	Baxter Artis (ev Surdial)
SÄS/Borås	033 - 616 22 17	Fresenius 6008
SÄS/Skene	0320 – 77 81 30	Fresenius 6008
SU/Sahlgrenska	031 – 342 11 30	Fresenius 6008
SU/Möln dal	031 – 343 01 30, 031 343 01 28	Fresenius 6008
SU/Östra	031 – 343 64 80	Fresenius 6008
Capio Lundby	031 – 65 72 86	B Braun Dialog IQ

Namn	Vardagar 07:00-16:00	Övrig tid
Eva-Lis Henriksson Vårdenhetschef	010-4355331	070-9104484
Anita Fredriksson	010-4355330	070-4945872
Tina Ladegaard	010-4355330	076-034769
Mary Dena Medicinskt ansvarig läkare	010-4354724	072-5772095
Västfastighet	010-4413500	010-4350000 Växeln
Trollhättans Energi AB	0520-497400	
Tjänsteman i beredskap (TIB)	010-4350000 Växeln	010-4350000 Växeln
Jan Mattson Medicinsk teknik	010-4352821 073-5946448	070-5563224
Martin Länsman Medicinsk teknik	010-4352814 072-2036194	072-2309030
Ventive end CWP	046-169660	
Anna Bäck Sakkunnig person	0721-050514	

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-96

Version: 10.0

Giltig från: 2026-03-17

Giltig till: 2028-03-17