

Gäller för: Endoskopimottagning Uddevalla sjukhus, Endoskopimottagning NÄL

Giltig från: 2025-12-12

Innehållsansvar: Marie Ouseley, (marou), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-12-12

Granskad av: Lena Sundberg Helldin, (lensu5), Vårdenhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

# Checklista visuell kontroll av duodenoskop

## Förändringar sedan föregående version

Inga justeringar.

## Bakgrund

Sannolikheten för funktionsstörningar i endoskopet ökar med antalet undersökningar och/eller den totala användningstiden. Utöver inspektionen före varje undersökning ska endoskopimottagningens duodenoskopansvariga regelbundet kontrollera skopens skick.

## Syfte

Skapa en rutin för att säkerställa att duodenoskoperna inte har några avvikelser. Detta för att förhindra vårdrelaterad skada och smitta.

## Åtgärder

**Nedanstående checklista ska gås igenom 1 gång per vecka:**

- Kontrollera kontrolldelen och ljusledaranslutnings-sektionen (klumpen)
- Kontrollera manschetten (kragen) och inloppsslangen intill manschett delen
- Kontrollera den utvändiga ytan på hela inloppsslangen inklusive böjningsdelen och den distala änden, glöm EJ svetsningen

- Kontrollera biopsivinklingsbryggan och området med lupp som är möjligt att syna i dess infällning medan biopsivinklingsbryggan höjs och sänks
- Kontroll av objektivet och ljusledarlinsen i den distala änden
- Kontrollera luft-/vattenmunstycket i den distala änden
- Kontrollera ledarlåsningens spår på biopsivinklingsbryggan

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Endoskopimottagning Uddevalla sjukhus,  
Endoskopimottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Marie Ouseley, (marou),  
Operationssjuksköterska

**Granskad av:** Lena Sundberg Helldin, (lensu5), Vårdenhetschef

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10068-1061594200-32

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-12-12

**Giltig till:** 2027-12-12