

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Giltig från: 2024-12-03

Innehållsansvar: Camilla Hellberg, (caman30), Undersköterska

Giltig till: 2026-12-03

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

# Bronkoskoprengöring engångs från Ambu

---

## Revidering i denna version

- Mindre förändringar.

## Bakgrund

På IVA, NÄL finns det 3 bronkoskop. Ett för fiberintubation från Olympus, (har extern ljuskälla), detta bronkoskop sitter på ”Svår luftvägsvagn”. Två monitorer för användning av engångsbronkoskop från Ambu med egen ljuskälla.

På stapeln sitter även Sug Poseidon från QMT

Det finns även bronkoskop i öronkorridoren på operation. Om vi lånar dessa så måste det ske **efter överenskommelse med operations personal**. Observera att det räcker att ta med bronkoskopet, extern ljuskälla finns på bronkoskopvagnen.

## Syfte

Att utrustning för bronkoskopi rengörs optimalt.

## Tillvägagångssätt

Engångsbronkoskop från Ambu aScope

När förpackningen öppnas tänk på att spara skyddshöljet.

1. Efter användning torka av utsidan på bronkoskopet med ytdesinfektion
2. Häll upp ca 250 ml NaCl i B6 skålen, tillsätt 1 droppe tvål, spola igenom.
3. Spola igenom bronkoskopet ytterligare med resterande NaCl, direkt ut flaskan.

4. Använd skyddshylsan för att skydda bronkoskopet då optiken är känslig.
5. Förvaras i påse i max 24 timmar, märks med Namn, personnummer, datum och tid.

När bronkoskopin är utförd kasseras engångsbronkoskopet i:

- **Gul låda för riskavfall**

Monitorn spritavtorkas.

Monitorn har internt batteri och skall därför alltid stå i elförsörjning. Fulladdat batteri ger en drifttid på ca 4 timmar.

Komplettera med ett nytt bronkoskop mm enligt checklista, från kompaktförrådet

Vid känd allmänfarlig smitta kasseras bronkoskopet direkt efter användning.

## Sug Poseidon från QMT

När bronkoskopin är utförd kassera

- Sugsystempåsen
- Bubbelslang
- Sugslangen
- Spritavtorka sugen och komplettera korgen

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

**Innehållsansvar:** Camilla Hellberg, (caman30), Undersköterska

**Granskad av:** Katarina Strid, (katst), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10086-1525759947-106

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-12-03

**Giltig till:** 2026-12-03