

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL
Innehållsansvar: Heike Apelman, (heiab), Ivasjuksköterska
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-10-27

Barn – Inställning av pumpar

Revidering i denna version

- Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering

Bakgrund/Syfte

Att tydliggöra handhavandet för en god och säker vård av barn.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på IVA.

Sprutpump/Infusionspump (Braun)

Alla läkemedel och dropp sätts i infusionspump eller sprutpump ställ in trycket i pumpen på 1, om det behövs titrera upp

För att ställa in tryck gör så här:

- Tryck på ”hus” knappen på Braun displayen
- Tryck på mottrycksgräns och ändra trycket till 1.

Infusionspump (Braun)

Infusionspumparna har som lägsta tryck på ”nivå 1” 50 mmHg.

Viktigt att ställa in trycket på lägsta nivå. Lite beroende på barnets ålder och kärlstorlek.

Sprutpumpens lägsta tryck är 75 mmHg

Ibland kan det vara svårt att använda lägsta tryck på pumparna pga att det går många infusioner i samma venflon och att venflonen i sig är så små. Använd lägsta möjliga trycknivå.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Heike Apelman, (heiab), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-25

Version: 9.0

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-10-27