

Gäller för: Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Giltig från: 2025-01-07

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2027-01-07

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

# Undertrycksbehandling (Vac-Pac) på IVA/IMA

---

## Revidering i denna version

- Förlängd giltighetstid.

## Syfte/Bakgrund

Undertrycksbehandling (Vac-Pac) är en avancerad metod för sårläkning där sårområdet försätts under ett jämnt negativt tryck(undertryck). Speciella svampförband, som används i såret garanterar att vätska kontinuerligt avlägsnas från såret.

## Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor IVA/IMA, NÄL.

## Tillvägagångssätt

- Vid uppstart av VAC-behandling ska datum för uppstart samt pumpnummer dokumenteras i patientjournalen. Dokumentera under "Patientbakgrund" och sedan under sökordet "hjälpmedel".
- Operation har en Vac-pump för akuta situationer. När denna tas i bruk meddelar de patientens hemavdelning som ansvarar för att operation får ner en ny pump samt ett startpaket (ett stort bukförband + 1 st kanister 1000 ml).
- Viktigt att plastlådan som Vac-Pac apparaten kom i följer patienten när hen förflyttas. I plastlådan förvaras hyreskontraktet.
- När vi på IVA/IMA har en patient med Vac-behandling är det viktigt att vi direkt kontaktar patientens hemavdelning och meddelar att patienten har en Vac-behandling och att det är deras uppgift att beställa material från KCI.
- Vi ska i god tid före planerad omläggning ta kontakt med hemavdelningen så att de kan få fram material som krävs.

- Obs! Planera inför helgen och måndag. KCI har öppet bara på vardagar.
- Vi byter kanistern där överflödigt vätska samlas när denna är full. Den kasseras i gul låda i sköljen. Tänk på att ringa hemavdelningen och hämta ner en ny kanister i god tid.
- Vac-Pac som startas upp via mottagning konteras på mottagningens kostnadsställe, i övrigt är det hemavdelningen som står för kostnad och materialbeställning. Detta gäller dock inte infektion. För utskrivna patienter med fortsatt behandling står hemavdelning för kostnad samt ansvarar för beställning av material.

## Avslutning av Vac-Pac på IVA/IMA


1. Pump och låda ska skickas till KCI.
2. Ta kopia av retursedeln och sätt in i pärmen märkt VAC-PAC avtal. Skriv när ni avslutat samt namn.
3. Klistra medföljande retursedel på lådan.
4. Ställ lådan vid ”Utgående post”
5. Meddela avslutningsdatum till Mediq på mejladress: kundservice@mediq.se eller ring 031-388 91 10, ange pumpnumret som står på pumpen, 4 siffror.
6. Ta bort dokumenterat pumpnummer och startdatum från patientjournalen under ”Patientbakgrund” och sedan ”hjälpmedel”.

Hemavdelningen betalar hyra tills apparaten skickats tillbaka.

## Bilaga

Vac-info sida 1 och sida 2


## Bilaga: Vac-info sid 1(2)

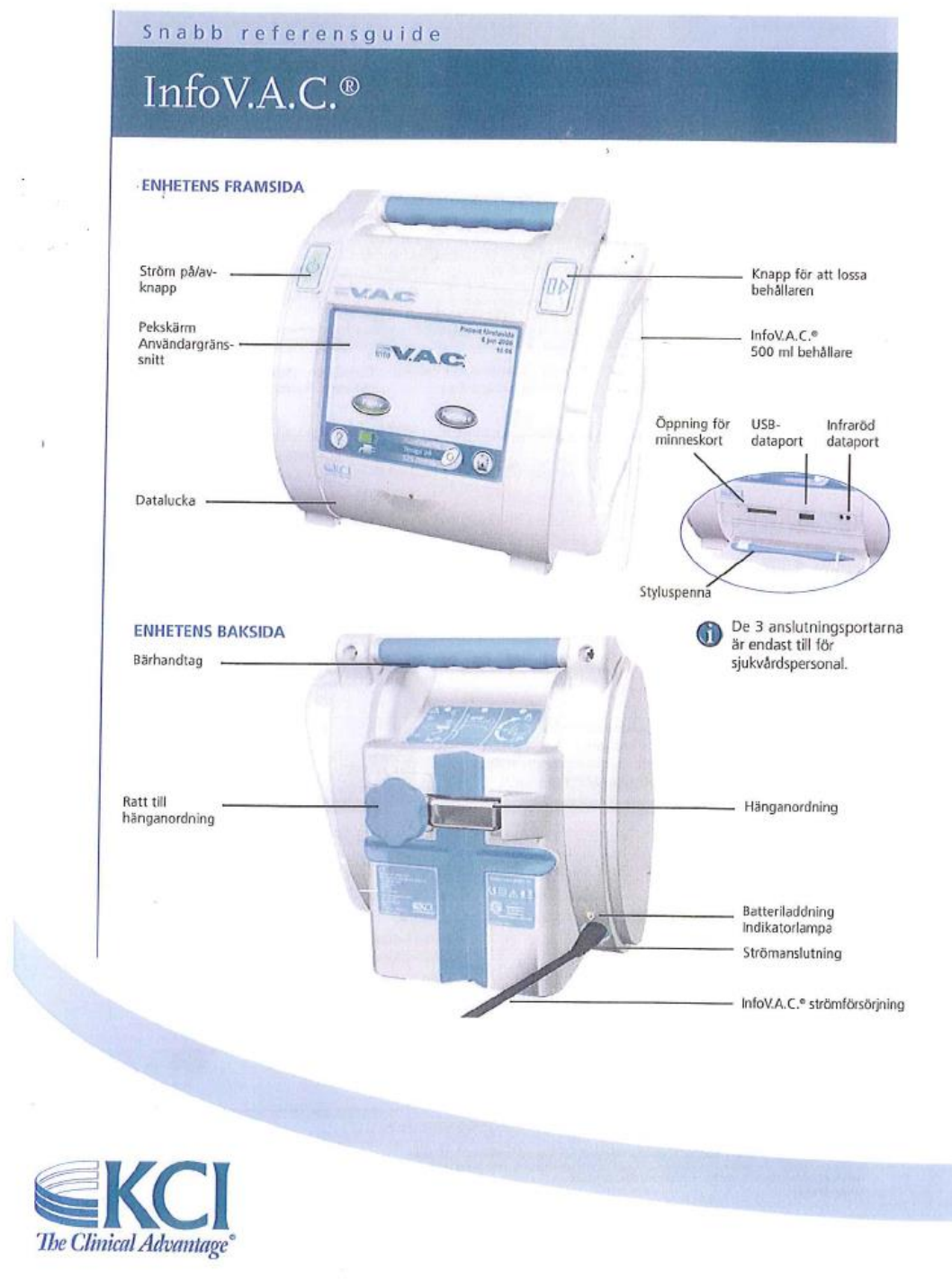

## Bilaga: Vac-info sid 2 (2)

InfoV.A.C.®

### KONTROLLSKÄRM



Terapi på/av-knapp

Åtkomst till verktygsskärm

Hjälpknapp

Lägesindikator  
Aktuellt datum  
Aktuell tid

Åtkomst till terapiskärm

Aktivera nattläge


Terapins statusfält och displayområde

Skärmlås


Indikator för batterinivå

Denna kontaktindikator visas vid anslutning till vägguttag

Denna ikon roterar när InfoV.A.C.® Therapy-enheten tillämpar negativt tryck





En grön tänd halvmåne innebär att funktionen är aktiverad.




En släckt halvmåne innebär att funktionen är inaktiverad.

### AKTIVERA V.A.C.® THERAPY


Tryck på  för att starta eller stänga av terapin.


Terapins startskärm visas när  är nedtryckt på sjukvårdspersonalens hemskärm.

 Ett grönt stapeldiagram indikerar att InfoV.A.C.® Therapy-systemet fungerar korrekt.


Från denna skärm kan sjukvårdspersonalen använda Seal Check™-verktyget för att se V.A.C.®-förbandets förslutning. Sjukvårdspersonalen kan också använda registreringsverktyget för att registrera ett behållarbyte eller antalet svampdelar som använts under ett förbandsbyte.

### INSTALLATION AV BEHÅLLARE


- Tryck på  för att starta enheten.
- Sätt fast behållaren.
  - Skjut fram behållaren till slutet på InfoV.A.C.® Therapy-enheten, såsom illustreras.
  - Placera noga behållaren på plats, ett hörbart klick signalerar att behållaren har installerats korrekt.



- Anslut behållarens slang till förbandsförbindelsen.
- Sätt ihop anslutningarna.
- Vid anslutningarna tills låsflikarna sitter fast helt.
- Öppna alla klämmor till slangen.



### Seal Check™

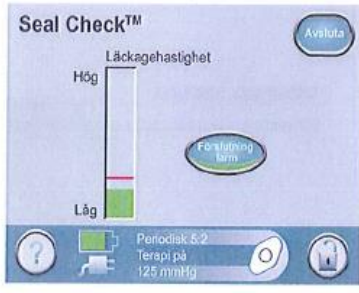

Avaluta

Hög

Låg

Läckagehastighet

Förslutning

Förslutning


Periodisk 6-2

Terapi på 125 mmHg

© 2007 KCI Licensing, Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken som omnämns i detta dokument tillhör KCI Licensing, Inc. dess dotterbolag eller licensinnehavare.

De KCI-varumärken som betecknas med "®"-symbolen är registrerade och de som betecknas med "TM" anses vara ägda varumärken eller pågående varumärkesansökningar i åtminstone ett land där produkten/arbetet saluförs. De flesta KCI-produkter som omnämns här är patenterade eller patentsökta.

KCI 1061-91-08-Sw



**KCI**  
The Clinical Advantage™  
www.kci-medical.com

Rubrik: Undertrycksbehandling (Vac-Pac) på IVA, IMA

Dokument-ID: NU10086-1525759947-90

Version: 11.0

4

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL,  
Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

**Innehållsansvar:** Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

**Granskad av:** Katarina Strid, (katst), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10086-1525759947-90

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-01-07

**Giltig till:** 2027-01-07