

Gäller för: Klinisk fysiologi NÄL, Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Sävthage, (karsa12), Sektionsledare

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01

Rengöring Ultraljud

Bakgrund

Leverantören av ultraljudsutrustningen godkänner enbart vissa rengöringsmedel.

Syfte

Att beskriva hur ultraljudsutrustningen och ultraljudsbritsen/tippbräda ska rengöras.

Förändringar sedan föregående version

Avtorkning av tangentbord på ultraljudsmaskinen.

Åtgärder

Se separat rutin för rengöring av transesofagal probe (TEE-probe).

Förbrukningsmaterial

- **Ipabaserad ytdesinfektion** med rengörande verkan, 45 vol% (ytdesinfektion plus)
 - Förvaras i plastburk med servetter på rulle (Handy Bucket Refill) cirka två flaskor ytdesinfektion (2 L) / burk.
- **Etanolbaserad ytdesinfektion, 75 vol%** (ytdesinfektion 75 +)
 - Förvaras i plasburk med servetter på rulle (Handy Bucket Refill) cirka två flaskor ytdesinfektion (2 L) / burk

Efter varje patient

- Torka av ultraljudsproben och eventuellt kladdigt tangentbord med papper och härefter med ipabaserad ytdesinfektion.
- Torka av brits, kudde med avtorkningsbart överdrag och EKG-kabel med etanolbaserad ytdesinfektion.
- Vid behov byt örngott.

En gång per vecka i samband med veckostädning

- Torka av ultraljudsmaskinen med diskmedel (neutralt) och vatten.
- Rengör filter på ultraljudsmaskinen där så är möjligt.
- Rengör underredet på britsen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinisk fysiologi NÄL, Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Sävhage, (karsa12), Sektionsledare

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10088-1069765838-73

Version: 4.0

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01