

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL, Endoskopimottagning  
Uddevalla sjukhus, Endoskopimottagning NÄL  
Innehållsansvar: Gunilla Johansson, (gunjo95), Anestesisjuksköterska  
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-07-14

Giltig till: 2027-07-10

# GlideScope handhavande och rengöring samt reservplan för rengöring av GlideScope på endoskopimottagningen

---

## Revidering i denna version:

Revidering under rubrik: Åtgärder

## Bakgrund

GlideScope är ett laryngoscopblad som används vid intubering av patienter. I samband med intubering används en ledare i kombination med GlideScopet.

Diskmaskinen på sterilcentralen används för rengöring.

Reservplan för diskning på endoskopimottagningen finns också för att säkerställa tillgången av GlideScopebladen.

## Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för säkert handhavande och rengöring av  
GlideScopebladen/ Engångsbronkoskop samt reservplan för rengöring av  
GlideScope på endoskopimottagningen.

## Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, undersköterskor samt anestesiläkare på  
Operation och Sterilcentralen, NÄL.

## Åtgärder

Akutstråket och Öron/Ortopedkorridoren har var sin stapel och dessa är kombination GlideScope/Bronkoskop. Kir/Gyn har korridoren har två Glidescopestaplar varan en är kombination Glidescope/Bronkoskop. Snittsalen har Glidescope (engångsblad).

Titanblad (kurverat) nr 3 finns i Svår Luftvägsvagn.

På varje GlideScope-stapel ska finnas två titanblad (kurverade) och två ledare, förutom på Snittsalen som har ett engångsblad nr 3 och 4 samt två ledare. Det ena bladet ska vara kopplat till kabel färdigt att användas. Det andra bladet finns som reserv. Det finns speciella Magill tänger för GlideScope. En vuxen och en barn tång finns på varje stapel och är uppmärkta med GlideScope. En vuxen och en barn tång finns att byta vid diskning och kommer att gå i rotation.

I akutstråket, kir/gyn samt Öron/ort finns även Smartkabel i Glidescopestaplarna för engångsblad storlek 1,2,3 och 4

Det ligger även ett Macintosh titanblad nr3 på stapel öron/ortoped samt stapeln i akutstråket (Undervisningssyfte)

### **Endast rena blad, ledare och Magill förvaras i korgarna på GlideScopestapeln!**

På GlideScopestapel i Akutstråket, Öron/Ort korridoren samt KIR/Gynska det hänga Engångsbronkoskop;

1st 5,8

2st 5,0

1st 3,8

## Användning

När ett blad använts lossas kabelns bajonettfattning och bladet torkas av med torr trasa och läggs i en rondsål, diskas snarast. Helst inom två timmar.

GlideScopet återställs för användning dvs. kabeln sprittorkas och monteras på det rena bladet och ställningen körs till sin plats.

## Kontrollera följande

- Att laddningsladd sitter i vägguttag och GlideScope
- **OBS! Att laddningsindikator lyser grönt OBS!**
- Återställ GlideScope med utrustning enligt beskrivning under rubrik ”Åtgärder”
- Att det rena GlideScopet har bild

Använt blad, ledare och Magill tas snarast till sterilcentralen för diskning. Den som tar ut blad, ledare och Magill till disken ansvarar för att ta med rent blad, ledare och Magill och placera dessa på GlideScopestapeln.

## Diskning

Lägg det använda bladet, ledaren och Magill i diskmaskinen och starta denna enligt instruktionen.

Om diskmaskinen är i gång läggs blad, ledare och Magill i korg till höger om diskmaskinen märkt ”smutsigt” GlideScope.

När diskmaskinen är klar öppnas luckan och blad, ledare och Magill tas ut. Det finns en korg ovanpå diskmaskinen för rent material. Kontakten på bladet är vattentätt men det kan samlas vätska där och man kan behöva skaka bladet lätt och blåsa försiktigt med tryckluft, för att vätskan ska försvinna.

Tänk på att inte smutsiga blad blir liggande odiskade. Ta gärna en titt vid diskmaskinen då och då på jourtid!

## Förvaring av rena blad och ledare

Rena blad finns på respektive GlideScope-stapel, i korgen ovanpå diskmaskinen och/eller i uppmärkt back i vagnen där övrig ren anesthesiutrustning förvaras, i anestesiförrådet, röd markering på dörren. Här ligger också GlideScope Magill tänger.

## Reservplan – Rengöring på Endoskopimottagningen

### Åtgärder

När reservplanen aktiveras ringer sterilcentralen och informerar MT anesthesi 51 548 och koordinator på IVA 51 360, samt sätter skyltar att diskmaskinen är trasig på de fem GlideScope- staplarna.

Det använda bladet och ledaren diskas på endoskopimottagningen i diskmaskin nr 5 som är märkt Nr 5 Jourtidsmaskin. Användaren är ansvarig för att lämna det i endoskopins sköljrum i avsedd trådkorg med lock. Denna korg tillsammans med 2st små fästen, bilder och manual för

GlideScope ligger i blå låda märkt med ”Korg till GlideScope” på hyllan över diskbänken. Dagtid är endoskopimottagningen ansvarig för att starta diskmaskinen.

Under jourtid ansvarar användaren för att själv gå till endoskopin och lägga in GlideScope och ledare i diskmaskinen, samt starta diskmaskinen.

Diskpersonalen på sterilcentralen är ansvarig för att hämta diskade blad som ligger i en grön låda märkt ”Rena GlideScope” på ren sida i Endoskopimottagningens skölj. De kommer direkt på morgonen och innan lunchrasten. Telefonansvarig på sterilcentralen hämtar på kvällen innan hemgång.

### Rengöring

Direkt efter användandet vid intubering

Gå till Endoskopimottagningens skölj och ta fram den blå lådan märkt ”Korg till GlideScope”.

## Dagtid:

1. Lägg GlideScopebladet och ledaren i trådkorg.
2. Lägg 2st små fästen i trådkorgen.
3. Sätt därefter trådkorgen på diskbänken.
4. Endoskopimottagningens personal ansvarar för att lägga in i diskmaskin.

## Jourtid:

1. Ta fram en diskkorg ur diskmaskin Nr 5
2. Lägg GlideScopebladen i trådkorgen med lock.
3. Sätt fast 2 st små fästen i diskkorgen och fäst ledaren.
4. Putta in diskkorgen ordentligt i diskmaskinen.
5. Följ därefter manual för GlideScope (ligger i den blå korgen) smutsig sida.

## Efter Disk:

1. När diskmaskinen är klar fortsatt och följ manualen för ren sida som ligger i den blå lådan.
2. När luckan har öppnats ta ur det rena GlideScopet, ledaren och de två små fästena.
3. Stäng luckan.
4. Glöm EJ att kvittera på smutsig sida av diskmaskinen (Se manual)
5. Lägg tillbaka trådkorg, fästen och avspritad manual i den blå lådan.
6. Ta med GlideScope och ledare.

## Medgranskare

Mattias Eriksson (mater12), Anestesisjuksköterska Operation NÄL

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL,  
Endoskopimottagning Uddevalla sjukhus, Endoskopimottagning  
NÄL

**Innehållsansvar:** Gunilla Johansson, (gunjo95),  
Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-136

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-07-14

**Giltig till:** 2027-07-10