

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Giltig från: 2024-09-03

Innehållsansvar: Ewa Wahlström Skott, (ewawa3), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2026-09-03

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

TEE-probe, rengöring och desinficering

Revidering i denna version

Ingen revidering.

Bakgrund

Transesofageal ekokardiografi (TEE) kan användas för bedömning av hjärtfunktion och volymstatus perioperativt och på IVA. Basala hygienrutiner gäller i samband med undersökningen. TEE-proben ska efter avslutad undersökning genomgå rengöring och desinficering enligt riktlinjer för höggradigt rena medicinska produkter. (1) Sådan bearbetning av proben förutsätter hjälp från sterilcentralen, men då denna inte bemannas dygnet runt behövs också en rutin för användning jourtid.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för rengöring och desinficering av AnOpIVAKlinikens TEE-probe (SonoSite TEEexp/8-3MHz) samt en rutin för användning jourtid.

Vilka berörs

Sterilcentralens personal, läkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor på operation och IVA, NU-sjukvården.

Metodbeskrivning

Vid användning av TEE-proben vardagar 07:30-20:30 samt söndagar mellan 12:00-18.00 ansvarar Sterilcentralens personal för disk av proben.

Övrig tid är ALL operationspersonal ansvarig.

Rengöring/disk

Före disk ska hela proben torkas av med en 45% sprittrasa. En tydlig manual med bilder i färg finns på väggen framför diskmaskinen. Maskinen finns i samma rum som Glidescopsdiskmaskinen.

Varje dag ska ett läcktest köras före maskinen kan användas för diskning. Diskprogrammet tar sen ca 20 minuter. Displayen visar grön bock när programmet är klart.

Efter diskning sätts ett grått engångsskydd på toppen av proben och sedan hängs proben upp i förvaringsskåpet i anestesiförrådet.

Eventuella larm

Larm kvitteras med KOD 200.

Referenser

1. Vårdhandboken. Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet: Renhetsgrader. 2019 [2020-10-02]. Available from: <https://www.varhandboken.se/vardhygien-infektioner-ochsmittspridning/desinfektion-och-sterilisering-av-produkter/medicintekniskaprodukter-med-specificerad-mikrobiell-renhet/renehetsgrader/>.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Ewa Wahlström Skott, (ewawa3),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-221

Version: 10.0

Giltig från: 2024-09-03

Giltig till: 2026-09-03