

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-09-11

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

Giltig till: 2026-09-11

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

# Lastteknik för flergångsinstrument i diskdesinfektorer

## Revidering i denna version

Ingen revidering

## Bakgrund

Att på ett korrekt sätt lasta diskdesinfektorn så att godset blir höggradigt rent.

## Syfte

En korrekt lastad diskdesinfektor gör så att godset blir höggradigt rent och säkerställer ett av kriterierna för steriliserat gods.

## Åtgärder

- Allt gods som har varit på sal samtidigt som patient betraktas som kontaminerat.
- Alla rörformiga instrument kopplas till system för genomspolning, även om de ej har varit i bruk under operation.
- När det är många instrument i ett instrumentgaller så fördela instrumenten lika mellan fler trådkorgar för att optimera rengöring och desinfektion.
- Om godset har ett från företagen medföljande tråg/galler ska dessa instrument placeras i sterilcentralens egna trådkorgar vid disk och de medföljande gallren ska diskas tomma.
- Alla instrument som går att montera isär (enl. tillverkaren) ska vara det under disk.
- Saxar och peanger ska sättas på ett instrumentstöd och ska vara öppna till 90 grader.
- Tänger öppnas med hjälp av så kallad Bandclamp och placeras lutade mot instrumentstödet.

- Laparoskopiska tänger plockas isär. Innerdelens ”käft” placeras på fjäder i en korg med silikonmatta så den hålls öppen och ytterrör samt handtag placeras på genomspolsramp.
- Lamphandtag lastas på ”pinnar” med hål i toppen.
- Diatermihylsor placeras på pinnar utan hål i toppen.
- Sladdar och slangar ska ligga i korg med lock, helst storrådiga korgar för att minska risken för blött gods.
  
- Skruvar och implantat ska vara med för påfyllning från operation innan godset hamnar i diskdesinfektorn.
- Vid synligt fastbränt material kan detta manuellt tas bort innan det lastas i maskinen.
  
- Allt returneras och skannas in i T-Doc för att följa spårbarheten och en diskbatch skapas.

### Innan diskdesinfektorn startas kontrolleras detta:

- Spolvingar snurrar obehindrat.
- Slangarna för genomspolsrengöring får ej vara vikta.
- ”Paraplylastning” eller överlastning får ej förekomma, annars kan detta resultera i en underkänd process med påföljande försening i arbetsflödet.

Robotinstrument (Da Vinci), Ultraljudsprob för robot och Ureteroskop följer separat rutin.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sterilcentral Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

**Granskad av:** Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-301

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-09-11

**Giltig till:** 2026-09-11