

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-06

Giltig till: 2026-09-06

# Manuell hantering och packning av höggradigt rent gods inför låg temp/väteperoxid-sterilisering

## Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Åtgärder.

## Bakgrund

Arbetet i packsalen ska ske standardiserat och lika för allt gods, vare sig det är operation- eller avdelningskvalitet.

En korrekt hantering och besiktning av instrument/flergångsmaterial gör så att godset kan bli steriliserat och patientsäkert.

## Syfte

Förenkling och förtydligande för medarbetare att följa händelseförloppet från diskdesinfektor till steriliseringsprocess.

Alla kriterier (torrt, höggradigt rent och rumstemp) ska vara uppfyllda för att gods kan bli sterilt.

## Åtgärder

På Uddevalla Sterilcentral används en väteperoxidautoklav av märket Sterrad NX100

1. Packbord i Sterradrummet spritas av.
2. Personal spritar sina händer och låter dem lufttorka.
3. Instrument/galler tas ur transportkorgen, insatsvagn och placeras på packbordet. Placerar sen ev. transportkorg på avsedd plats.  
Godset ska vara torrt, rumstempererat och höggradigt rent innan packning.
4. Sprita händer och låt dem lufttorka.

5. Okulärbesikta och kontrollera varje instrument för sig.  
Vid upptäckt av fel eller kontaminering följer vi givna rutiner.
6. Skanna ut ny enhet/er ur T-DOC via diskbricka eller följesedel.  
Det är speciella etiketter och packsedlar (OH-blad) till sterradprodukter och kan endast skrivas ut i Sterradrummet.
7. På T-Doc etiketten anges vilket förpackningsmaterial som ska användas för vilken produkt (Tyvek sterilpåse eller packskynte One-step).  
Etiketten sätts på utsidan av förpackningen.
8. När sterilpackningen är gjord placeras det inslagna gallret direkt i Sterraden medan sterilpåsar placeras i låga korgar med lock och sen in i Sterraden.  
Sterilpåsar placeras papper mot plast och flera påsar får plats i samma korg, men det ska finnas utrymme till expansion som sker i Sterraden.  
Korgbricka placeras ej i Sterraden.
9. I tarifolderna och på etiketten anges vilket program som produkten kan köras i.  
Batcha in processen och starta de program som är angivet av produkttillverkaren.

Gods som ska sterradsteriliseras och kommer ifrån NÄL packar vi bara om i ny ytterförpackning, tar ut kopia på etikett och packlista och batchas in i Sterrad. På detta gods kontrollerar vi endast att "vent-capen" sitter på laparoskopet, inga andra kontroller behövs göras eftersom detta är packat och godkänt av sterilpersonal på NÄL.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sterilcentral Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

**Granskad av:** Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-302

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-09-06

**Giltig till:** 2026-09-06