

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-19

Giltig till: 2026-09-19

Manuell hantering och packning av höggradigt rent gods inför Ångautoklavsterilisering

Revidering i denna version

Ingen revidering.

Bakgrund

Arbetet i packsalen ska ske standardiserat och lika för allt gods, vare sig det är operation- eller avdelningskvalitet.

En korrekt hantering och besiktning av instrument/flergångsmaterial gör så att godset kan bli steriliserat och patientsäkert.

Syfte

Förenkling och förtydligande för medarbetare att följa händelseförloppet från diskdesinfektor till steriliseringsprocess.

Alla kriterier (torrt, höggradigt rent och rumstempererat) ska vara uppfyllda för att gods kan bli sterilt.

Åtgärder

1. Packbord i packsalen spritas av.
2. Personal spritar sina händer och låter dem lufttorka.
3. Instrument/galler tas ur transportkorgen, insatsvagn och placeras på packbordet. Placerar sen ev transportkorg på avsedd plats.
Godset ska vara torrt, rumstempererat och höggradigt rent innan packning.
4. Sprita händer och låt dem lufttorka.
5. Okulärbesikta och kontrollera varje instrument för sig.
Vid upptäckt av fel eller kontaminering följer vi givna rutiner.

6. Skanna ut nya enheter ur T-Doc via diskbricka eller följesedel.
7. Galler läggs ihop efter packlista eller särpacka löspackade instrument och set. På T-Doc etiketten anges vilket förpackningsmaterial som ska användas (sterilpåse, packskynke eller Container).
Etiketten sätts på utsidan av förpackningen.
8. När sterilförpackningen är gjord placeras produkterna i autoklavkorgar.
Galler placeras 1 st / autoklavkorg (ev 2 st om det är små galler) och korgbricka placeras på kortsidan.
Sterilpåsar placeras papper mot papper, plast mot plast. Flera påsar får plats i samma autoklavkorg, men det ska finnas utrymme till expansion.
Korgbricka placeras på kortsidan.
9. Autoklavkorgen med förpackat gods placeras på insatsvagn med korgbrickan ut mot salen, för att invänta en autoklavprocess.
10. Returnerade följesedlar signeras och den nya följesedeln till kund placeras båda i sterilförrådet.

Gods som kommer från ögonoperation packas på deras egen avdelning och vi placerar endast korgarna på insatsvagnarna i väntan på sterilisering.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-303

Version: 4.0

Giltig från: 2024-09-19

Giltig till: 2026-09-19