

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-09-06

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

Giltig till: 2026-09-06

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

# Manuell och automatiserad rengöring av Da Vinci instrument

## Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Åtgärder,

## Bakgrund

Att följa de rekommendationer och föreskrifter som finns för att instrumenten till Robotoperationerna ska bli höggradigt rena.

## Syfte

Denna process garanterar ett patientsäkert resultat inför sterilisering genom validerade processer och ett korrekt hanterande, enligt tillverkarens anvisningar.

## Åtgärder

Klä dig i skyddsutrustning som finns i diskmodulen (förkläde med lång ärm, långa handskar och visir).

1. Tappa upp vatten, 30-35°, till markeringen i diskhon (40 liter).  
Tryck på självdoseringsknappen. (stänger av sig själv när den är klar)
2. Ta ev. bort tillbehör på instrumenten, saxen främst, använd då den blå silikonhylsan. Kontrollera om livsindikatorn har slagit om till rött, kassera i så fall instrumentet på operation.  
Nytt instrument finns i sterilcentralens osterilaförråd och ska behandlas som de övriga instrumenten.
3. Sänk ner instrumenten i rengöringslösningen och fyll sakta port 1 med 15 ml rengöringslösning.  
Låt ligga i minst 30 minuter.  
Endoskopet kopplas till speciell slangspolsats på Da Vinci-insatsen.

4. Spola port 1 med högtrycksspolen i minst 20 sek, om blodigt spola längre, och vrid samtidigt spetsen på instrumentet i olika riktningar.  
Spola port 2 och vrid/vicka på huset i 20 sek.
5. Spreja spetsen och leder med högtrycksspolen under vattenytan i 30 sek.
6. Borsta med ren mjuk nylonborste på alla leder (medtråds) och käftar nedsänkt under vattenytan i 60 sek.
7. Skölj hela instrumentet under rinnande kallt vatten.
8. Öppna käftarna något och placera det korrekt på avsedd disksinsats.
9. Fäll ner bågen över alla husen när samtliga instrumenten är ditsatta, stäng de kopplingar som inte används. Rengör finfiltret och kontrollera att en proteinsticka sitter i hylsan.
10. Batcha in disksinsatsen på diskdesinfektor 3 eller 4 på ett Da Vinci program (P3).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Sterilcentral Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Nathalie Martinsson, (natma12), Steriltekniker

**Granskad av:** Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-304

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-09-06

**Giltig till:** 2026-09-06