

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2025-06-05

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12), Sektionsledare

Giltig till: 2027-06-05

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Manuell rengöring av uretäriscop inför automatiserad process i diskdesinfektor

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Syfte, Åtgärd

Bakgrund

Att följa de rekommendationer och föreskrifter som finns för att uretäriscopet ska kunna bli höggradigt rent.

Syfte

Att få en standardiserad och enkel rutin att följa vid manuell rengöring av uretäriscopet för sterilcentralens personal

Åtgärder

Sterilcentralens personal tar hand om detta måndag-fredag.

Klä dig i skyddsutrustning; förkläde och långa handskar (vanliga handskar på operation)

1. Avlägsna alla kranar genom att dra kranen rakt upp ur instrumentet. Lägg kranarna tillsammans med gummiproppar och gula packningar i en liten trådkorg.
2. Tappa upp vatten (30-35°) och Getinge Enzymmedel eller Getinge Universalmedel i diskhon. Dosering enligt anvisning vid diskho.
3. Borsta Wolfnippeln först och koppla den sen på genomspolsrampen eller på en slang i en korg.
Borsta igenom kanaler och kranhus under vattenytan (använd de 3 borstar som ligger i ett rör på hyllan i diskmodulen). På operation finns dessa borstar på avveckling 1-2.

Spola igenom kanalerna med vattenpistol eller en 20 cc spruta med vatten. Borsta Wolf hålrum och skruvgänga och avsluta med att skölja under rinnande vatten.

4. Lägg uretäriscopet i sin korg och anslut 3 st. slangar enligt bild i tarifolder.
5. Ställ instrumentkorgen på högkant med det svarta okularet nedåt på diskingsatsen och koppla fast slangarna på avsedd plats i genomspolsrampen. Batcha/skanna in instrumentet på diskbricka och till maskinprocessen. Kontrollera att inga slangar är knickade innan processen startas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Nathalie Martinsson, (natma12),
Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-305

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-05

Giltig till: 2027-06-05