

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2025-12-15

Innehållsansvar: Martin Svensson, (marsv173), Steriltekniker

Giltig till: 2027-12-15

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Ultraljudsbad: Uppstart, användning och avstängning

Revidering i denna version

Ingen revidering

Bakgrund

En enkel och lättföljd rutin för uppstart och avstängning av Sonomic Ultraljudsbad samt användningsområde, som finns i gamla disken på sterilcentralen.

Syfte

Ultraljudsbadet används som en förstärkt rengöring för att lossa på partiklar som diskdesinfektorerna inte alltid kommer åt. De instrument som ultras ska direkt in i diskdesinfektorn igen då Ultraljudsbadet inte ger ett höggradigt rent resultat.

Åtgärder

Ultraljudsbadet används som en förstärkt rengöringsmetod av vissa instrument, t.ex. raspar och flexibla märgborrar.

Det kommer en påminnelse på de galler där vissa delar av gallret ska ultras. Dessa ska diskas om efter denna process.

UPPSTART AV ULTRALJUD

- Slå på strömbrytaren på baksidan och se till att kranen på höger sida är stängd.
- Mån + Tors: Fyll tanken med 18 – 25 gradigt vatten till markering och håll i 20 ml mild rengöringsmedel = mild lösning
- Tryck på ”OK” därefter ”Done” --> Självtest startar (pågår ca 30 sek)
- Tryck på ”Degassing” (pågår ca 10 min)
- Gör ett adapttest/läcktest: Fäst bandet med de gula pluggarna på övre och nedre adaptterrader (lås dem inte) och sänk ner korgen i badet. Tryck på ”start” (pågår ca 5 min)
- Kontrollera i display om läcktestet är OK eller om den indikerar att några adaptrar måste kontrolleras, se vilket nummer som läcker, åtgärda och gör om adapttest/läcktest.
- Om OK , Tryck på ” Mode 1” för att fortsätta med genomspolningsprogrammet. (pågår ca 15 min)

Varje gång ett program har körts så tryck på ”Yes” eller ”Later” om du ska kunna fortsätta med körningar under dagen.

AVSTÄNGNING AV ULTRALJUD

- Tryck på ”tillbaka knappen” [<<] nere i vänster hörn.
- Tryck på ”NO” —> Apparaten börjar att skölja ur

Måndag

- Slå på strömbrytaren på baksidan och se till att kranen på höger sida är stängd.
- Mån + Tors: Fyll tanken med 18 – 25 gradigt vatten till markering och håll i 20 ml milt rengöringsmedel
- Tryck på ”OK” därefter ”Done” --> Självtest startar (pågår ca 30 sek)
- Tryck på ”Degassing” (pågår ca 10 min)
- Gör ett adapttest/läcktest: Fäst bandet med de gula pluggarna på övre och nedre adaptterrader (lås dem inte) och sänk ner korgen i badet. Tryck på ”start” (pågår ca 5 min)
- Kontrollera i display om läcktestet är OK eller om den indikerar att några adaptrar måste kontrolleras, se vilket nummer som läcker, åtgärda och gör om adapttest/läcktest.
- Om OK , Tryck på ” Mode 1” för att fortsätta med genomspolningsprogrammet. (pågår ca 15 min)

Fredag

- Öppna kranen på hö sida och töm tanken helt
- Tryck på ”Done”
- Stäng kranen och fyll med rent vatten (18 -25°), se till att alla adaptrar är öppna och korgen nersänkt.
- Tryck på ”Start rinsing” (pågår ca 4 min.)
- Öppna åter kranen på hö sida, håll ut vattnet ur adaptrarna och spola ur tanken från skum.
- När tanken är tom stäng kranen och tryck på ”Done”
- Stäng av knappen på baksidan

Onsdag

- Öppna kranen på hö sida och töm tanken helt
- Tryck på ”Done”
- Stäng kranen och fyll med rent vatten (18 - 25°), se till att alla adaptrar är öppna och korgen nersänkt
- Tryck på ”Start rinsing”
(pågår ca 4 min.)
- Öppna åter kranen på hö sida, håll ut vattnet ur adaptrarna och spola ur tanken från skum.
- När tanken är tom stäng kranen och tryck på ”Done”
- Stäng av knappen på baksidan

Onsdag fortsättning

- Slå på strömbrytaren på baksidan och se till att kranen på höger sida är stängd.
- Mån + Tors: Fyll tanken med 18 – 25 gradigt vatten till markering och håll i 20 ml milt rengöringsmedel
- Tryck på ”OK” därefter ”Done” --> Självtest startar (pågår ca 30 sek)
- Tryck på ”Degassing” (pågår ca 10 min)
- Gör ett adapttest/läcktest: Fäst bandet med de gula pluggarna på övre och nedre adapterraderna (lås dem inte) och sänk ner korgen i badet. Tryck på ”start” (pågår ca 5 min)
- Kontrollera i display om läcktestet är OK eller om den indikerar att några adaptrar måste kontrolleras, se vilket nummer som läcker, åtgärda och gör om adapttest/läcktest.
- Om OK , Tryck på ” Mode 1” för att fortsätta med genomspolningsprogrammet. (pågår ca 15 min)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sterilcentral Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Martin Svensson, (marsv173), Steriltekniker

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-311

Version: 7.0

Giltig från: 2025-12-15

Giltig till: 2027-12-15