

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-01-16

Innehållsansvar: Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-16

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

# Reservrutin Mobilett 1 och 2 – NÄL

## Sammanfattning/Syfte

Manuell inskrivning av patientdata i mobiletter 1 och 2 (IVA, akutmottagningen, avdelning 34).

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Starta apparaten

1. Arbetslista (Worklist)
  - Tryck på **New** (längst ner till vänster)
  - Skriv in ID och patientens namn
  - Tryck på **Start Exam**
2. Välj (+) och lägg till protokoll, tryck **Close**.
  - Exponera
3. Kontrollera bilden
  - Tryck **Auto Send**  
Bilderna skickas nu till PACS.

## Skicka bilderna till Syngo.via

- Gå till **Review**
- Markera aktuell patient
- Tryck på **Send to** (längst ner till vänster)
- Välj Syngo.via och **OK**

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

**Godkänd av:** Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1537046713-596

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-01-16

**Giltig till:** 2027-01-16