

Avstängning Skelettlabb. 3 – Uddevalla samt skelettlabb. 11 - NÄL

Syfte

Avstängning av Adoran efter arbetsdagens slut måste utföras i rätt ordning för att säkra att alla delar stängs.

Förändringar sedan föregående revision

Inga förändringar.

Bakgrund

Rutin vid avstängning av röntgensystemet Adora.

Åtgärder

- Börja med att parkera maskinen.
- Aktivera autopositionen för parkering, detta görs antingen ifrån pekskärmen på röntgenröret eller från fjärrterminalen i manöverrummet.

Autoposition via röntgenröret:

- Välj kugghjulsikonen bland flikarna upptill på skärmen och välj **parkera**.

Autoposition via kontrollmonitorn:

- Välj kugghjulsikonen bland flikarna upptill på skärmen och tryck på **P** för att aktivera autopositionen för parkering.
- Kör Adoran till positionen

Stäng av systemet i följande ordning:

1. *Adora:*

Adorans takenhet stängs av från pekskärmen på röntgenröret eller från fjärrterminalen i manöverrummet.

- Tryck på kugghjulsikonen och välj **shut down** längst till höger på skärmen.
- Tryck på boken för att bekräfta valet.

2. *Bildåtergivningsystem:*

- Klicka på knappen system (ikonen upp till höger som ser ut som en dator) och välj sedan shutdown i övre högra hörnet.
- Välj sedan **shutdown** igen.
- System och datorn stängs av automatiskt.

Innehållsansvariga

Sanna Axelsson, röntgensjuksköterska och
Malgorzata Jilderby, röntgensjuksköterska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-103

Version: 5.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09