

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Joel Hagman, (joeha7), Undersköterska

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Giltig från: 2025-02-11

Giltig till: 2027-02-11

Kontroll av sug och syrgas på labben – Uddevalla

Bakgrund

Att tydliggöra rutinerna vid kontroll av sug och syrgas på de olika labben.

Förändringar sedan föregående version

Sammanbindningsrör på slangen finns i förrådet och signeringslistan hänger i slussen.

Åtgärder

Syrgas/O2

- Kontrollera att det finns sammanbindningsrör på slangen, dessa finns i förrådet och signeringslistan hänger i slussen.
- Öppna kranen och känn att det ”blåser”.
- Stäng kranen.
- Det ska finnas en grön sugslang CH14 och en svart sugslang CH10 på varje syrgasuttag.

Sug

- Sätt på kranen.
- Täpp till båda ingångarna på Y-röret med fingrarna och känn att det ”suger”.
- Stäng kranen.
- **Om det inte fungerar:** Kontrollera i första hand att locket/plastbehållaren sitter fast ordentligt.

Lägeskontroll

- Om ett gasuttag ”pyser” utan att någon utrustning sitter i, måste detta omedelbart anmälas till Västfastigheter.
- Om det ”pyser” från ett gasuttag där någon utrustning sitter monterad gör följande: Tystnar ”pyset” när utrustningen tas bort, skicka den till MTA för reparation.

Dokumentation

- Kontrollerna utförs varje dag.
- Efter att kontrollerna är gjorda signeras på lista som finns i slussen: [Signeringslista för kontroll av sug/syrgas och hjärtstartare](#), (hänger i lilla fikarummet).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Joel Hagman, (joeha7), Undersköterska

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-19

Version: 5.0

Giltig från: 2025-02-11

Giltig till: 2027-02-11