

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2025-03-10

Innehållsansvar: Carina Granström, (cagr2), Undersköterska

Giltig till: 2027-03-10

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

Kontroll av sug och syrgas på labben - NÄL

Bakgrund

Att tydliggöra rutinerna vid kontroll av sug och syrgas på de olika labben.

Förändringar från föregående version

Inga förändringar.

Syrgas/O₂:

- Kontrollera att det finns sammanbindningsrör på slangen (finns annars i förrådet).
- Öppna kranen och känn att det ”blåser”.

Stäng kranen.

På labbet ska det finnas: Extra sammanbindningsrör 4 x 7, mask och grimma.

Sug:

- Sätt på kranen genom att dra ut knappen åt vänster.
- Tapp till båda ingångarna på Y-röret med fingrarna och känn att det ”suger”.
- Stäng kranen.
- **Om det inte fungerar:** Kontrollera i första hand att locket/plastbehållaren sitter fast ordentligt.

På labbet ska det finnas: Sugkatetrar i olika storlekar (blå CH8, svart CH10, vit CH12, grön CH14, orange CH16).

Läckagekontroll:

- Om ett gasuttag ”pyser” utan att någon utrustning sitter i, måste detta omedelbart anmälas till Västfastigheter.
- Om det ”pyser” från ett gasuttag där någon utrustning sitter monterad gör följande: Tystnar ”pyset” när utrustningen tas bort, skicka den till MTA för reparation.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Carina Granström, (cargr2), Undersköterska

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-366

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-10

Giltig till: 2027-03-10