

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2024-08-14

Innehållsansvar: Macarena Zara Zara, (machi1), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-08-14

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

Reservrutin DT 9 och 10 – Bildbehandling efter export av bilder från Syngo.via till DT – NÄL

Bakgrund

Det finns möjlighet att exportera bilder från Syngo.via till DT9 och DT10.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Sammanfattning/syfte

Vid de tillfällen undersökningen är raderad på modaliteten men man behöver nya snitt, kan man exportera bilddata från Syngo.via till modaliteten på nytt.

Åtgärder

Instruktioner för tillvägagångssätt: [Exportera patient från Syngo.via till modalitet t ex CT](#).
Instruktionerna finns under Syngo.via på intranätet.

Bildbehandling

När bilderna är exporterade från Syngo.via till vald modalitet, markera ikonerna MPR och ta upp Directory-listan. Patientens uppgifter hittas nu i patientlistan.

En återförd undersökning kan man endast ändra snitt på, inte kernel eller fönstersättning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Macarena Zara Zara, (machi1), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-423

Version: 3.0

Giltig från: 2024-08-14

Giltig till: 2026-08-14