

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-05-11

Innehållsansvar: Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

Giltig till: 2028-05-11

Godkänd av: Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

# Reservrutin Skelettlab. - PACS-stopp

## Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när PACS inte fungerar.

## Syfte

Stoppa bildöverföring/bildarkivering från Adora till PACS.


## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Åtgärder

### Reservrutiner då PACS inte fungerar

Vid stopp i PACS:et kan inte bilderna gå över från modalitet till PACS:et, de lägger sig då i kö på modalitet, varför dessa rutiner måste följas:

- Gå in i PAST-list
- Klicka på ikonen 
- Bocka ur Sectra-PACS
- Bocka i Syngo.via
- Save to system

### Rutiner efter PACS-stopp

- När PACS:et åter har kommit igång återställer personalen inställningarna och de undersökningar som inte gått över skickas manuellt från modalitet till PACS.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Malgorzata Jilderby, (marji6), Sektionsledare

**Godkänd av:** Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-431

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-05-11

**Giltig till:** 2028-05-11