

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare
Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09

Reservrutin Skelettlab. RIS och PACS-stopp - Uddevalla

Bakgrund

Vid stopp i både RIS och PACS kan varken radiologen eller remittenterna se bilder på vanligt sätt. Radiologen granskar bilder i Syngo.via och skriver svar enligt reservrutin RIS/PACS-stopp.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Rutin

När man på Mediel-labb avslutar undersökningen det vill säga klickar på **END STUDY** kommer det att komma upp flera felmeddelanden som talar om att det inte finns någon anslutning kopplad, inget arkiv storage.

Ändra storage/arkiv från PACS till Syngo.via och fortsatt som vanligt med bildöverföring.

För att kunna koppla ihop bilderna med RIS i efterhand måste patienten skrivas in manuellt på modalitet eftersom det inte finns någon **DWL** (Dicom Work List).

- Klicka på **PATIENT** som vanligt när du ska välja patient.
- Första felmeddelandet talar om att det inte gått att hitta någon patientinformation från RIS ”*Association error*”.
- Klicka **OK**.
- Klicka på **MANUELL** för att kunna skriva in Patientens namn, ID och Accession nummer.
PACS-administratörerna är tacksamma om Uddevalla skriver:
UDD i Accession nummer/Study ID.
- Röntga

- Du behöver inte skriva in patienten igen för varje ny undersökning utan tar alla bilder på en och samma inskrivning. PACS-administratörerna segmenterar bilderna i efterhand när de rättar.
- När du är nöjd med bilderna klicka på **END STUDY**. Bilderna försöker nu föras över till PACS/Arkivet.
- Ett felmeddelande kommer i det övre högra hörnet. Klicka på den gula rutan med felmeddelandet.
- Du får nästa felmeddelande "*Dicom connect error*" (hittar inte PACS).
- Klicka på **CANCEL**.
- Du får en fråga "*Are you sure?*"
- Klicka på **OK**.
- Du får samma meddelande igen "*Dicom connect error*" (hittar inte PACS).
- Klicka på **CANCEL**.
- Du får samma fråga igen "*Are you sure?*"
- Klicka **OK**.

Du får i efterhand sända över bilderna manuellt från modaliteten.

- Klicka på **STUDY**.
- Markera patienten.
- Klicka på **RESEND ALL**.

Man kan se vilka bilder som inte har gått över till PACS. På de lagrade bilderna står det OK längst till höger men på de bilder som inte är lagrade står ned **NG** (No Good).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-432

Version: 4.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09