

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2026-03-09

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-09

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Uppstart Skelettlab. 3 – Uddevalla samt skelettlab. 11 – NÄL

Syfte

Uppstart av Adora måste utföras i rätt ordning för att säkra att alla delar startas korrekt.

Förändringar sedan föregående version

Rutinen reviderad.

Bakgrund

Rutin vid uppstart av röntgensystemet Adora.

Uppstart

- **Adora:**
Sätt igång Adora-stativet genom att trycka på den översta av de tre knapparna ”**start positioner**” på framsidan av kontrollpanelen alternativt på **ON-knappen** vid joysticken i manöverrummet.

När programmet har startat:

- Välj – Användarnamn.
- Skriv in Lösenord.
- Klicka på – LOG IN
- Starta eventuella trådlösa detektorer.
- Värm upp röntgenröret.
- Starta en undersökning genom att välja – **Emergency**
- Välj PrePacket uppvärmning och tryck på – **Exam**

Följ sedan instruktionerna på Adoras pekskärm:

- Exponera tre gånger. Systemet pausar 30 sekunders mellanrum.
- Ta bort de exponerade tomma bilderna, genom att välja **Reject** på varje.
- Avsluta med att trycka – **End Exam** och välj sedan ”**Not add study information**”.
- Välj – **Ok**
- **KLAR**

OBS! Skulle systemet stå inaktivt en längre stund kan eventuellt en ny uppvärmning behövas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,
Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-491

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09